

OTE x80, P x80

Gebruiksaanwijzing



Made for
iPhone | iPad | iPod

Specsavers
Advance
Your hearing, your way



Inhoudsopgave

Welkom	4
<hr/>	
Uw hoortoestel	5
<hr/>	
Type toestel	5
Vertrouwd raken met uw hoortoestellen	6
Componenten en benamingen	7
Bedieningsregelaars	9
Luisterprogramma's	10
Functies	10
Batterijen	11
<hr/>	
Batterijformaat en hanteertips	11
Batterijen vervangen	12
Veiligheidsfunctie (optioneel)	13
Dagelijks gebruik	15
<hr/>	
In- en uitschakelen	15
Stand-bystand	16
De hoortoestellen in- en uitdoen	17
Het volume aanpassen	20
Het kiezen van een luisterprogramma	21
Bijkomende aanpassingen (optioneel)	21

Bijzondere luistersituaties	22
Aan de telefoon	22
Audiostreaming	22
Ringleidingen	24
Onderhoud en verzorging	25
Hoortoestellen	25
Oorstukjes en slangetjes	26
Professioneel onderhoud	28
Meer informatie	29
Veiligheidsinformatie	29
Accessoires	29
Verklaring van symbolen	29
Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden	30
Problemen oplossen	31
Specifieke nationale informatie	32
Service en garantie	35

Welkom

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor onze hoortoestellen. Natuurlijk heeft u, net zoals met alle nieuwigheden, even tijd nodig om hiermee vertrouwd te raken.

Deze aanwijzing zal u samen met de ondersteuning van uw audicien helpen om meer te weten te komen over de voordelen en de betere levenskwaliteit die uw hoortoestellen u zullen bieden.

Om zoveel mogelijk uit uw hoortoestellen te halen, adviseren wij u om ze elke dag een hele dag lang te dragen. Hierdoor zult u er snel aan gewend raken.



VOORZICHTIG

Lees deze gebruiksaanwijzing en de veiligheidsaanwijzing grondig en volledig door. Volg de veiligheidsinformatie om schade of letsel te voorkomen.



Uw toestel kan er iets anders uitzien dan de afbeeldingen in deze handleiding. We behouden ons het recht voor de wijzigingen door te voeren die we noodzakelijk achten.

Uw hoortoestel



Deze gebruikershandleiding beschrijft optionele functies waarover uw hoortoestellen al dan niet kunnen beschikken.

Vraag uw audicien om aan te geven welke functies geldig zijn voor uw hoortoestellen.

Type toestel

Uw hoortoestel is een BTE (Behind-The-Ear = achter het oor) model. Het geluid wordt via een slangetje van het hoortoestel in het oor gebracht. De toestellen zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar of personen met een verstandelijk niveau lager dan dat van een 3-jarige.

Met de draadloze functionaliteit kunt u geavanceerde audilogische functies gebruiken en uw twee hoortoestellen synchroniseren.

Uw hoortoestellen zijn voorzien van Bluetooth® Low Energy* technologie waarmee u eenvoudig gegevens kunt uitwisselen met uw smartphone en voor naadloze audiostreaming met uw iPhone** en voor sommige Android smartphones

* De Bluetooth markering en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door WS Audiology Denmark A/S van dit product gebeurt onder licenties. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.

** iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc. en zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

die audiostreaming voor hoortoestellen (ASHA) ondersteunen.

Let op: Bluetooth is niet beschikbaar voor alle prestatieniveaus.

Vertrouwd raken met uw hoortoestellen

Het is aan te bevelen dat u zich vertrouwd maakt met uw nieuwe hoortoestellen. Terwijl u de hoortoestellen in uw hand houdt, probeert u de bedieningsregelaars te gebruiken en gaat u na waar ze zich op het toestel bevinden. Op die manier kunt u de bedieningsregelaars gemakkelijker terugvinden en bedienen wanneer u de hoortoestellen draagt.



Als u problemen hebt met de bedieningsregelaars van uw hoortoestellen terwijl u de toestellen draagt, kunt u bij uw audicien vragen of er een afstandsbediening of een smartphone app beschikbaar is om uw hoortoestellen te bedienen.

Componenten en benamingen

Uw hoortoestellen zijn ofwel bevestigd aan een toonbocht en een op maat gemaakt oorstukje of aan een standaard slangetje en een standaard oorstukje.



1 Oorstukje

2 Slangetje

3 Microfoonopeningen

4 Tuimelschakelaar

5 Toonbocht


6 Batterijlade (aan-/uitschakelaar)

7 Zijde-indicatie
(rood = rechts,
blauw = links)

U kunt standaard oorstukjes in combinatie met een standaard slangetje of op maat gemaakte oorstukjes in combinatie met een toonbocht en een slangetje gebruiken.

Het vervangen van de standaard oorstukjes en het reinigen van het standaard slangetje is heel eenvoudig. Lees meer in hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

U kunt de volgende standaard oorstukjes gebruiken:

Standaard oorstukjes	Formaat
<input type="radio"/> 	Sleeve 3.0 Vented/Closed/ Power
<input type="radio"/> 	Eartip 3.0 Open
<input type="radio"/> 	Eartip 3.0 Tulip

De standaard oorstukjes kunnen gemakkelijk vervangen worden. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

Op maat gemaakte oorstukjes	
<input type="radio"/> 	Earmold 3.0

Bedieningsregelaars

Met de tuimelschakelaar kunt u bijvoorbeeld een ander luisterprogramma kiezen. De audicien heeft de door u gewenste functies geprogrammeerd in de tuimelschakelaar.

Functie tuimelschakelaar	L	R
Kort indrukken:		
Programma omhoog/omlaag	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Volume harder/zachter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tinnitus-functie hoger/lager niveau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tv-stream aan/uit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ongeveer 2 seconden indrukken:		
Programma omhoog/omlaag	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Volume harder/zachter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tinnitus-functie hoger/lager niveau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tv-stream aan/uit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = Links, R = Rechts



U kunt ook een afstandsbediening gebruiken om luisterprogramma's te kiezen en het volume van uw hoortoestellen aan te passen. Met onze smartphone-app beschikt u over nog meer bedieningsmogelijkheden.

Luisterprogramma's

1

2

3

4

Lees meer in hoofdstuk
"Het kiezen van een luisterprogramma".

Functies

- De **tinnitus-functie** genereert een geluid dat u afleidt van uw tinnitus.
- Er is een **luisterspoel** ingebouwd zodat het hoortoestel verbinding kan maken met een ringleiding.

Lees meer in hoofdstuk "Ringleidingen".

Batterijen

Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt het geluid zwakker en/of hoort u een waarschuwingssignaal. Het type batterij zal bepalen wanneer u de batterij dient te vervangen.

Batterijformaat en hanteertips

Vraag uw audicien naar de aanbevolen batterijen.

Batterijformaat:	13
------------------	----

- Gebruik steeds het juiste batterijformaat voor uw hoortoestellen.
- Verwijder de batterijen als u de hoortoestellen enkele dagen niet wilt gebruiken.
- Draag steeds reservebatterijen bij u.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk en volg uw plaatselijk regelgeving met betrekking tot het verwijderen van batterijen.


Batterijen vervangen

De batterij verwijderen:

- ▶ Open de batterijlade.



- ▶ Gebruik de magneetstick om de batterij te verwijderen. De magneetstick is verkrijgbaar als accessoire.

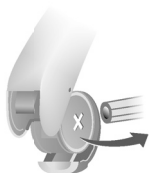

De batterij plaatsen:

- ▶ Als de batterij een beschermende folie heeft, dient u deze pas te verwijderen wanneer u klaar bent om de batterij te gebruiken.



- ▶ Plaats de batterij met het symbool "+" omhoog in de batterijklep (zie afbeelding).



Opmerking: Plaats de batterij niet rechtstreeks in de behuizing.

- ▶ Sluit de batterijklep voorzichtig; deze kan beschadigd raken.

Druk alleen onder een rechte hoek en op de plek die op de afbeelding staat aangegeven. Gebruik hierbij geen kracht.

Als u een weerstand voelt, is de batterij niet goed geplaatst korrekt.



Veiligheidsfunctie (optioneel)

Vraag uw audicien om de veiligheidsfunctie te activeren.

UIT-stand als het toestel niet wordt gebruikt:

- ▶ De batterijlade kan makkelijk een paar millimeter worden geopend om het hoortoestel uit te schakelen

Om er zeker van te zijn dat het hoortoestel in de buurt van kleine kinderen veilig is opgeborgen, moet de batterijlade worden geopend naar de UIT-stand als het hoortoestel niet wordt gebruikt.




Maak de batterijlade alleen helemaal open als u de batterij verwisselt.

Zo opent u de batterijlade:

- ▶ Plaats een doekje of tissue over de greep van de batterijlade.

- ▶ Open de lade met uw duim zoals aangegeven op de afbeelding.

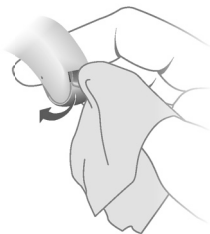

i

Er is nu meer kracht nodig om de lade te openen dan zonder de veiligheidsfunctie.

Dagelijks gebruik

Om een comfortabel en gemakkelijk gebruik van uw hoortoestellen te garanderen, zijn ze uitgerust met een geïntegreerd bedieningselement.

Daarnaast is er een app voor Android en iPhones om de bediening van uw hoortoestellen nog eenvoudiger te maken. Neem contact op met uw audicien voor het downloaden en installeren van de smartphone app.

In- en uitschakelen

U kunt uw hoortoestellen in- of uitschakelen met behulp van de batterijlade:

- ▶ Inschakelen: Sluit de batterijlade.

Het **standaard** volume en luisterprogramma zijn ingesteld.

- ▶ Uitschakelen: Open de batterijlade tot de eerste stop.



Wanneer de **inschakelvertraging** geactiveerd is, schakelen de hoortoestellen met enkele seconden vertraging in. Gedurende die tijd kunt u de hoortoestellen indoen zonder een vervelend fluitgeluid te horen.

De "inschakelvertraging" kan door uw audicien worden geactiveerd.

Stand-bystand

De stand-bystand dempt de hoortoestellen. Ze zijn niet volledig uitgeschakeld en gebruiken nog steeds een beetje stroom. Daarom bevelen we aan om de stand-bystand alleen voor korte tijd te gebruiken.

Zo schakelt u de stand-bystand in:

- via de afstandsbediening
- via de tuimelschakelaar.

Druk de tuimelschakelaar in en houd deze enkele seconden ingedrukt.

Stand-bystand afsluiten:

- Het laatst gebruikte volume en luisterprogramma zijn ingesteld.
- Als u de stand-bystand wilt verlaten terwijl u de afstandsbediening niet bij de hand hebt, kunt u uw toestel uit- en weer inschakelen (door de batterijlade te openen en te sluiten). In dit geval worden het standaard volume en luisterprogramma ingesteld.

De hoortoestellen in- en uitdoen

Uw hoortoestellen zijn afgesteld op uw rechter en linker oor. Kleurmarkeringen geven de zijde aan:

- rode markering = rechter oor
- blauwe markering = linker oor




Een hoortoestel plaatsen:

- ▶ Houd het slangetje dicht bij het oorstukje vast.
- ▶ Duw het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang ①.
- ▶ Draai het lichtjes tot het goed zit.

Open en sluit uw mond om te voorkomen dat er zich lucht in de gehoorgang ophoopt.

- ▶ Til het hoortoestel op en schuif het over de bovenkant van uw oor ②.

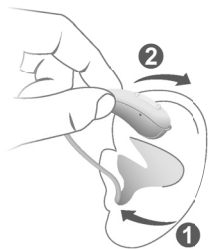



- Het kan handig zijn om het **rechter** hoortoestel met de **rechter** hand en het **linker** hoortoestel met de **linker** hand te plaatsen.
- Als u problemen hebt met het inbrengen van het oorstukje, gebruikt u de andere hand om uw oorlel voorzichtig omlaag te trekken. Hierdoor gaat de gehoorgang open en kan het oorstukje gemakkelijker worden ingebracht.



VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- ▶ Plaats het oorstukje voorzichtig en niet te diep in het oor.


De optionele ConchaLock zorgt ervoor dat het oorstukje veilig in uw oor blijft zitten. Om de ConchaLock te plaatsen:

- ▶ Buig de ConchaLock en plaats deze voorzichtig in de binnenrand van uw oorschelp (raadpleeg de afbeelding).



Een hoortoestel verwijderen:

- ▶ Til het hoortoestel op en schuif het over de bovenkant van uw oor ①.
- ▶ Houd het slangetje dicht bij het oorstukje vast en trek het oorstukje voorzichtig naar buiten ②.

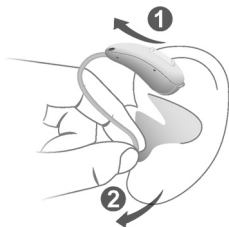

VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- ▶ In zeer zelden voorkomende gevallen kan het oorstukje in uw oor achterblijven wanneer u het hoortoestel uitneemt. Als dit gebeurt, laat het oorstukje dan verwijderen door een medisch specialist.

Reinig en droog uw hoortoestellen na gebruik. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

Het volume aanpassen

Uw hoortoestellen passen automatisch het volume aan de luistersituatie aan.

- ▶ Als u er de voorkeur aan geeft het volume handmatig te regelen, drukt u op het bovenste deel van de tuimelschakelaar om het volume te verhogen of op het onderste deel om het volume te verlagen.

Zie het hoofdstuk "Bedieningsknoppen" om de tuimelschakelaar in te stellen.

Bij het wijzigen van het volume kan er optioneel een signaal worden afgegeven. Wanneer het maximale of het minimale volume bereikt is, hoort u mogelijk een optionele signaaltoon.

Het kiezen van een luisterprogramma

Afhankelijk van de luistersituatie passen uw hoortoestellen het geluid automatisch aan.

Uw hoortoestellen hebben mogelijk ook een aantal luisterprogramma's waarmee u het geluid, indien nodig, kunt wijzigen. Een optionele signaaltoon kan de programmawijziging aangeven.

- ▶ Druk kort op de tuimelschakelaar om van hoorprogramma te wisselen.

Zie het hoofdstuk "Bedieningsknoppen" om de tuimelschakelaar in te stellen. Zie het hoofdstuk "Luisterprogramma's" voor een lijst van uw luisterprogramma's.

Het standaard volume wordt toegepast.

Bijkomende aanpassingen (optioneel)

U kunt de bedieningsregelaars van het hoortoestel ook gebruiken om andere parameters te wijzigen, bijvoorbeeld het geluidsvolume van de tinnitusfunctie.

Raadpleeg het hoofdstuk "Bedieningsregelaars" om uw bedieningsregelaars in te stellen.

Bijzondere luistersituaties

Aan de telefoon

Wanneer u telefoneert, houdt u de telefoonluidspreker iets boven uw oor. Het hoortoestel en de telefoonluidspreker moeten op elkaar uitgelijnd zijn. Draai de luidspreker lichtjes, zodat het oor niet volledig bedekt is.



Telefoonprogramma

Wellicht prefereert u een bepaald volume wanneer u de telefoon gebruikt. Vraag uw audicien om een telefoonprogramma te configureren.

- Schakel over naar het telefoonprogramma wanneer u telefoneert.

Of een telefoonprogramma geconfigureerd is voor uw hoortoestellen, is vermeld in het hoofdstuk "Luisterprogramma's".

Audiostreaming

De volgende informatie over audiostreaming geldt **niet** voor alle modellen van het hoortoestel. Vraag uw audicien om aan te geven welke functies geldig zijn voor uw hoortoestellen.

Audiostreaming met iPhone

Uw hoortoestellen zijn Made for iPhone hoortoestellen. Dit houdt in dat u met uw hoortoestellen rechtstreeks telefoongesprekken kunt voeren en muziek kunt luisteren vanaf uw iPhone.

Neem contact op met uw audicien voor meer informatie over compatibele iOS-apparaten, koppelen, audiostreaming en andere handige functies.

Audiostreaming met een Android smartphone

Als uw smartphone Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) ondersteunt, kunt u met uw hoortoestellen rechtstreeks telefoongesprekken voeren en naar muziek luisteren vanaf uw smartphone.

Neem contact op met uw audicien voor meer informatie over compatibele Android apparaten, koppelen, audiostreaming en andere handige functies.

Bluetooth

Uw toestel is uitgerust met Bluetooth®* draadloze technologie om audiostreaming van mobiele telefoons of andere compatibele apparaten mogelijk te maken.

In een vliegtuig kan het gebruik van Bluetooth functionaliteit worden beperkt, vooral tijdens het opstijgen en landen. Als dit het geval is, kunt u Bluetooth draadloze technologie in uw toestel uitschakelen via de

* De Bluetooth markering en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door WS Audiology Denmark A/S van dit product gebeurt onder licenties. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.

smartphone-app.

Ringleidingen

Sommige telefoontoestellen en openbare ruimtes zoals theaters bieden het audiosignaal (muziek en spraak) aan via een ringleiding. Met dit systeem kunnen uw hoortoestellen het gewenste signaal rechtstreeks ontvangen – zonder storende omgevingsgeluiden.

Ringleidingen worden meestal aangegeven met speciale borden.



Wanneer u zich in een ruimte bevindt met een ringleiding:

- ▶ schakel over naar het ringleidingprogramma.

Of een ringleidingprogramma geconfigureerd is voor uw hoortoestellen, staat vermeld in het hoofdstuk "Luisterprogramma's".

Onderhoud en verzorging

Om schade te voorkomen is het belangrijk dat u zorg draagt voor uw hoortoestellen en dat u een aantal basisregels volgt. Deze zullen gauw deel gaan uitmaken van uw dagelijkse routine.

Hoortoestellen

Drogen en bewaren

- ▶ Droog uw hoortoestellen 's nachts.
- ▶ Wanneer u uw hoortoestellen langere tijd niet gebruikt, bewaart u ze met open batterijlade en verwijderde batterijen in een droge omgeving.
- ▶ Neem contact op met uw audicien voor meer informatie.

Reinigen

Uw hoortoestellen zijn voorzien van een beschermende coating. Als ze echter niet regelmatig worden gereinigd, kunnen de hoortoestellen beschadigd raken of kunnen deze persoonlijk letsel veroorzaken.

- ▶ Reinig uw hoortoestellen dagelijks met een zachte, droge doek.
- ▶ Gebruik nooit stromend water en dompel de toestellen nooit onder in water.
- ▶ Oefen nooit druk uit tijdens het reinigen.
- ▶ Informeer bij uw audicien naar aanbevolen



reinigingsprocedures, speciale verzorgingssets en verdere informatie over hoe u uw hoortoestellen in een optimale toestand kunt houden.

Oorstukjes en slangetjes

Cerumen (oorsmeer) kan zich opstapelen op de oorstukjes. Dit kan de geluidskwaliteit beïnvloeden.

- Voor hoortoestellen met een standaard slangetje:

Maak de buitenkant van de slangetjes dagelijks schoon met een tissue om vuil te verwijderen.

De slangetjes moeten worden vervangen als u verslechtering of verkleuring ziet.

Gebruik geen reinigingsmiddelen met alcohol of agressieve chemicaliën, omdat de slangetjes hierdoor beschadigd kunnen raken.

- Voor hoortoestellen met een toonbocht:

Reinig de oorstukjes dagelijks.


Vraag uw audicien om, indien nodig, de slangetjes te reinigen of de oorstukjes en slangetjes te vervangen.

Oorstukjes reinigen

- ▶ Maak de oorstukjes dagelijks schoon met een tissue om opgehoopt oorsmeer te verwijderen.


Vervang de oorstukjes als ze er niet meer goed uitzien of als u ze niet meer goed schoon krijgt.

- ▶ Het oorstukje nooit onder stromend water afspoelen of in water dompelen.

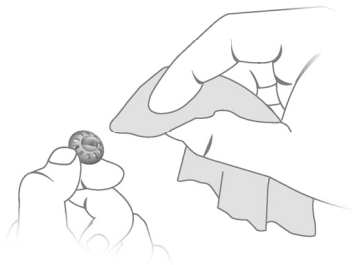

Standaard oorstukjes vervangen

- ▶ Trek het gebruikte oorstukje eraf en breng een nieuw oorstukje aan.

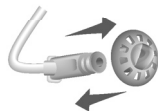

VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- ▶ Draag het slangetje altijd met een oorstukje.
- ▶ Let erop dat het oorstukje volledig bevestigd is.

Vervangen van standaard slangetjes

- ▶ Schroef het gebruikte slangetje los van het hoortoestel.



- ▶ Schroef het nieuwe slangetje erop.

Professioneel onderhoud

Uw audicien kan uw hoortoestellen grondig reinigen en onderhouden.

Op maat gemaakte oorstukjes en cerumenfilters moeten door uw audicien worden vervangen.

Vraag uw audicien naar uw individuele onderhoudstermijnen en ondersteuning.

Meer informatie

Veiligheidsinformatie

Meer informatie over de veiligheid vindt u in de veiligheidshandleiding die met het toestel wordt geleverd.

Accessoires

U kunt de smartphone app gebruiken voor een comfortabele bediening op afstand van uw hoortoestellen. Verder kunt u de app gebruiken om signaaltönen te deactiveren, individuele geluidsprofielen te creëren en nog veel meer.

U kunt ook een afstandsbediening gebruiken.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.

Verklaring van symbolen



Duidt op een situatie die tot ernstige, middelzware of lichte letsels kan leiden.



Maakt u attent op mogelijke materiële schade.



Adviezen, tips en belangrijke informatie.



CE-conformiteitslabel, bevestigt de conformiteit met bepaalde Europese Richtlijnen, zie het hoofdstuk "Conformiteitsinformatie".



Geeft de wettelijke fabrikant van het apparaat aan.

Made for

iPhone | iPad | iPod

"Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekenen dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen voor een verbinding met een iPod, iPhone of iPad en door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor het functioneren van dit apparaat, of in hoeverre dit voldoet aan de veiligheidsstandaarden en regelgeving. Houd er rekening mee dat het gebruik van deze accessoire met een iPhone, iPad of iPod de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden

Gebruiksomstandigheden	
Temperatuur	0 tot 50 °C 32 tot 122 °F
Relatieve luchtvochtigheid	5 tot 93 %

Neem tijdens langere periodes van transport en opslag de volgende voorwaarden in acht:

	Opslag	Transport
Temperatuur	10 tot 40 °C 50 tot 104 °F	-20 tot 60 °C -4 tot 140 °F
Relatieve luchtvochtigheid	10 tot 80%	5 tot 90 %

Voor andere onderdelen, zoals batterijen, kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.

Problemen oplossen

Problemen en mogelijke oplossingen

Het geluid is zwak.

- Verhoog het volume.
- Vervang de lege batterij.
- Reinig of verwissel het oorstukje.

Het hoortoestel maakt een fluitend geluid.

- Plaats het oorstukje opnieuw tot het stevig zit.
- Verlaag het volume.
- Reinig of verwissel het oorstukje.

Het geluid klinkt vervormd.

- Verlaag het volume.
- Vervang de lege batterij.
- Reinig of verwissel het oorstukje.

Het hoortoestel geeft signaaltönen af.

- Vervang de lege batterij.

Het hoortoestel werkt niet.

- Schakel het hoortoestel in.
- Sluit de batterijlade voorzichtig helemaal.
- Vervang de lege batterij.
- Controleer dat de batterij op de juiste manier is geplaatst.
- De inschakelvertraging is actief. Wacht enkele seconden en controleer opnieuw.

Neem contact op met uw audicien als u verdere problemen ondervindt.

Specifieke nationale informatie

VS en Canada

Informatie over certificering voor hoortoestellen met draadloze functie:

OTE x80

- HVIN: RFM007
- Bevat FCC ID: 2AXDT-RFM007
- Bevat IC: 26428-RFM007

P x80

- HVIN: RFM006
- Bevat FCC ID: 2AXDT-RFM006
- Bevat IC: 26428-RFM006

Service en garantie

Serienummers

Links:

Rechts:

Servicedatums

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Garantie

Datum aankoop:

Garantieperiode in maanden:

Uw audicien

 **Wettelijke fabrikant**

WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyngø
Denemarken

WSAUD A/S is een merklicentie van
Specsavers Optical Superstores Limited


0123

Document No. 05327-99T01-5400 NL
Order/Item No. 210 265 25
Master Rev01, 02.2023
© 02.2023, WSAUD A/S. All rights reserved

SSWSAUGB13MV10123, SSWSAUGB13PV10123
www.specsavers.com

