

RIC LI x80

RIC LI T x80

Gebruiksaanwijzing



Made for
iPhone | iPad | iPod

Specsavers
Advance
Your hearing, your way



Inhoudsopgave

Welkom	4
<hr/>	
Uw hoortoestellen	5
<hr/>	
Type toestel	5
Vertrouwd raken met uw hoortoestellen	6
Componenten en benamingen	7
Bedieningsregelaars	9
Luisterprogramma's	10
Functies	10
Dagelijks gebruik	11
<hr/>	
De hoortoestellen in- en uitdoen	11
In- en uitschakelen	15
Overschakelen naar standby-stand	17
Het volume aanpassen	18
Het kiezen van een luisterprogramma	19
Bijkomende aanpassingen (optioneel)	19
Opladen	20
Bijzondere luistersituaties	23
<hr/>	
Aan de telefoon	23
Audiostreaming met iPhone	23
Audiostreaming met een Android smartphone	24
Bluetooth	24
Ringleiding (alleen RIC LI T x80)	24

Onderhoud en verzorging	26
Hoortoestellen	26
Oorstukjes	28
Professioneel onderhoud	30
Belangrijke veiligheidsinformatie	31
Meer informatie	35
Accessoires	35
Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden	35
Verwijderingsinformatie	37
In dit document gebruikte symbolen	37
Probleemoplossing voor hoortoestel	38
Specifieke nationale informatie	39
Service en garantie	43

Welkom

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor onze hoortoestellen. Natuurlijk heeft u, net zoals met alle nieuwigheden, even tijd nodig om hiermee vertrouwd te raken.

Deze handleiding zal u samen met de ondersteuning van uw audiciens helpen om meer te weten te komen over de voordelen en de betere levenskwaliteit die uw hoortoestellen u zullen bieden.

Om zoveel mogelijk uit uw hoortoestellen te halen, adviseren wij u om ze elke dag een hele dag lang te dragen. Hierdoor zult u er snel aan gewend raken.



Uw toestel kan er iets anders uitzien dan de afbeeldingen in deze handleiding. We behouden ons het recht voor de wijzigingen door te voeren die we noodzakelijk achten.



VOORZICHTIG

Lees deze gebruikershandleiding en de veiligheidshandleiding grondig en volledig door. Volg de veiligheidsinformatie om schade of letsel te vermijden.



Laad uw hoortoestellen volledig op voordat u ze voor het eerst gebruikt. Volg de instructies in de handleiding van de lader.

Uw hoortoestellen



Deze gebruiksaanwijzing beschrijft optionele functies waarover uw hoortoestellen al dan niet kunnen beschikken.

Vraag uw audicien om aan te geven welke functies geldig zijn voor uw hoortoestellen.

Type toestel

U heeft een RIC (Receiver-in-Canal (luidspreker-gehoorgang)) model hoortoestellen. De luidspreker wordt in de gehoorgang geplaatst en met het toestel verbonden via een luidsprekerverbinding. De toestellen zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar of personen met een verstandelijk niveau lager dan dat van een 3-jarige.

In uw hoortoestel is permanent een accu (oplaadbare lithium-ionbatterij) ingebouwd. Dit maakt snel opladen mogelijk met Charging Station R of de optionele Travel Charger RIC of Charging+ Station R.

Met de draadloze functionaliteit kunt u geavanceerde audiologische functies gebruiken en uw twee hoortoestellen synchroniseren.

Uw hoortoestellen zijn voorzien van Bluetooth® low energy* technologie waarmee u eenvoudig gegevens kunt uitwisselen met uw

* De Bluetooth markering en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door WS Audiology Denmark A/S van dit product gebeurt onder licenties. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.

smartphone en voor naadloze audiostreaming met uw iPhone* en voor sommige Android smartphones die audiostreaming voor hoortoestellen (ASHA) ondersteunen.

Vertrouwd raken met uw hoortoestellen


Het is aan te bevelen dat u zich vertrouwd maakt met uw nieuwe hoortoestellen. Terwijl u de hoortoestellen in uw hand houdt, probeert u de bedieningsregelaars te gebruiken en gaat u na waar ze zich op het toestel bevinden. Op die manier kunt u de bedieningsregelaars gemakkelijker terugvinden en bedienen wanneer u de hoortoestellen draagt.



Als u problemen hebt met de bedieningsregelaars van uw hoortoestellen terwijl u de toestellen draagt, kunt u bij uw audicien vragen of er een afstandsbediening of een smartphone app beschikbaar is om uw hoortoestellen te bedienen.




* iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc. en zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

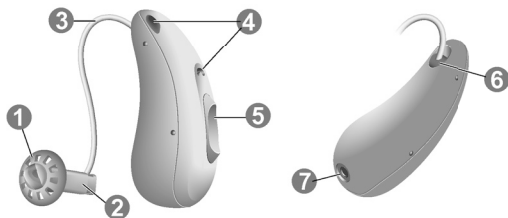Componenten en benamingen



-
- | | |
|-------------------------|---|
| 1 Oorstukje | 5 Tuimelschakelaar
(bediening,
aan/uit-schakelaar) |
| 2 Luidspreker | |
| 3 Luidsprekerverbinding | 6 Zijde-indicatie
(rood = rechter oor,
blauw = linker oor)
en verbinding met de
luidspreker |
| 4 Microfoonopeningen | |
| | 7 Oplaadcontactpunten |
-

U kunt de volgende standaard oorstukjes gebruiken:

Standaard oorstukjes	Formaat
<input type="checkbox"/> 	Sleeve 3.0, Vented, Closed, Power
<input type="checkbox"/> 	Eartip 3.0 Open
<input type="checkbox"/> 	Eartip 3.0 Tulip

De standaard oorstukjes kunnen gemakkelijk vervangen worden. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

Op maat gemaakte oorstukjes
<input type="checkbox"/> 

Bedieningsregelaars

Met de tuimelschakelaar kunt u bijvoorbeeld een ander luisterprogramma kiezen. De audicien heeft de door u gewenste functies geprogrammeerd in de tuimelschakelaar.

Functie tuimelschakelaar	L	R
Kort indrukken:		
Programma omhoog/omlaag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Volume harder/zachter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tinnitus-functie: niveau omhoog/omlaag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tv-stream aan/uit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ongeveer 2 seconden indrukken:		
Programma omhoog/omlaag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Volume harder/zachter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tinnitus-functie: niveau omhoog/omlaag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tv-stream aan/uit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Langer dan 3 seconden indrukken:		
In-/uitschakelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L = Links, R = Rechts



U kunt ook een afstandsbediening gebruiken om luisterprogramma's te kiezen en het volume van uw hoortoestellen aan te passen. Met onze smartphone-app beschikt u over nog meer bedieningsmogelijkheden.

Luisterprogramma's

1

2

3

4

5

6

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk
"Het kiezen van een luisterprogramma".

Functies



De **tinnitus-functie** genereert een geluid dat u afleidt van uw tinnitus.

Dagelijks gebruik

Om een comfortabel en gemakkelijk gebruik van uw hoortoestellen te garanderen, zijn ze uitgerust met een geïntegreerd bedieningselement. Daarnaast is er een app voor Android en iPhone om de bediening van uw hoortoestellen nog eenvoudiger te maken. Neem contact op met uw audicien voor het downloaden en installeren van de smartphone app.

De hoortoestellen in- en uitdoen

Uw hoortoestellen zijn afgesteld op uw rechter en linker oor. Kleurmarkeringen geven de zijde aan:


- rode markering = rechter oor
- blauwe markering = linker oor




Een hoortoestel indoen:

- ▶ Zorg er bij Sleeves voor dat de bocht van de Sleeve is uitgelijnd met de bocht van de luidsprekerverbinding.
Zie de volgende afbeeldingen.

Juist:

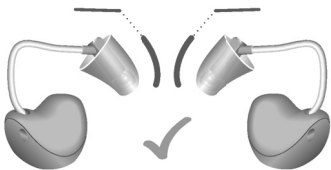


Niet juist:

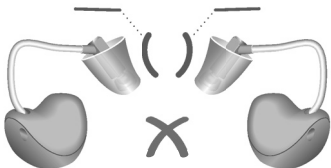

- ▶ Houd de luidsprekerverbinding vast aan de bocht die zich het dichtst bij het oorstukje bevindt.
- ▶ Duw het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang ①.
- ▶ Draai het hoortoestel lichtjes tot het goed zit.

Open en sluit uw mond om te voorkomen dat er zich lucht in de gehoorgang ophoopt.

- ▶ Til het hoortoestel op en schuif het over de bovenkant van uw oor ②.

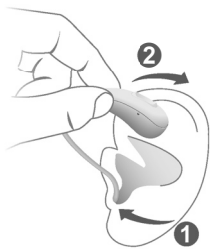



- Het kan handig zijn om het **rechter** hoortoestel met de **rechter** hand en het **linker** hoortoestel met de **linker** hand in te doen.
- Als u problemen hebt met het inbrengen van het oorstukje, gebruikt u de andere hand om uw oorlel voorzichtig omlaag te trekken. Hierdoor gaat de gehoorgang open en kan het oorstukje gemakkelijker worden ingebracht.

De optionele ConchaLock zorgt ervoor dat het oorstukje veilig in uw oor blijft zitten. Om de optionele ConchaLock te bevestigen:

- ▶ Lijn het uiteinde van de ConchaLock uit met het platte uiteinde van de luidspreker.



- ▶ Druk vervolgens de ConchaLock richting de luidspreker totdat deze vastklikt.



Om de ConchaLock te plaatsen:

- ▶ Buig de ConchaLock en plaats deze zorgvuldig in het dieper gelegen deel van uw oor (zie afbeelding).



Een hoortoestel uitdoen:

- ▶ Til het hoortoestel op en schuif het over de bovenkant van uw oor ①.

- ▶ Als uw hoortoestel uitgerust is met een op maat gemaakt oorstukje of een mold, verwijdert u deze door het kleine trekkoord naar de achterzijde van uw hoofd te trekken.

- ▶ Voor alle andere oorstukjes: Pak de luidspreker in de gehoorgang vast met twee vingers en trek de luidspreker voorzichtig uit het oor ②.

Trek niet aan de luidsprekerverbinding.

Reinig en droog uw hoortoestellen na gebruik.

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk

"Onderhoud en verzorging".


In- en uitschakelen

U heeft de volgende mogelijkheden om uw hoortoestellen in of uit te schakelen.

Met de lader:

- ▶ Inschakelen: Neem de toestellen uit de lader.

In uw hoortoestellen wordt de beginmelodie afgespeeld. Het **standaard** volume en

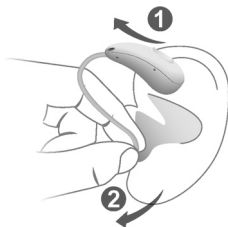

luisterprogramma zijn ingesteld.

- ▶ Uitschakelen: Plaats de hoortoestellen in de lader.

Let op: de lader moet aangesloten zijn op de voedingsbron. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de lader.

Via de tuimelschakelaar:

- ▶ Inschakelen: Houd het onderste deel van de tuimelschakelaar ingedrukt totdat de opstartmelodie klinkt. Laat de tuimelschakelaar los terwijl de melodie wordt afgespeeld.



Het **standaard** volume en luisterprogramma zijn ingesteld.

- ▶ Uitschakelen: Houd het bovenste of onderste deel van de tuimelschakelaar enkele seconden ingedrukt. Er wordt een afsluitlemelodie afgespeeld.



Overschakelen naar standby-stand

Met de afstandsbediening of de smartphone app kunt u uw hoortoestellen op standby-stand zetten. Dit dempt de hoortoestellen. Wanneer u de standby-stand verlaat, worden het **laatst gebruikte** volume en luisterprogramma ingesteld.

Opmerking:

- In standby-stand worden de hoortoestellen **niet** volledig uitgeschakeld. Ze verbruiken een kleine hoeveelheid stroom.
Daarom bevelen we aan om de standby-stand alleen te gebruiken voor een korte duur.
- Als u de stand-bystand wilt verlaten, maar geen toegang hebt tot de afstandsbediening of de app: Zet uw hoortoestellen uit en opnieuw aan (met de tuimelschakelaar of door ze even in de oplader te plaatsen tot er een groene LED begint te branden). In dit geval worden het **standaard** volume en luisterprogramma ingesteld.

Het volume aanpassen

Uw hoortoestellen passen automatisch het volume aan de luistersituatie aan.

- ▶ Als u er de voorkeur aan geeft het volume handmatig te regelen, drukt u op het bovenste deel van de tuimelschakelaar om het volume te verhogen of op het onderste deel om het volume te verlagen.

Zie het hoofdstuk "Bedieningsknoppen" om de tuimelschakelaar in te stellen.

Bij het wijzigen van het volume kan er optioneel een signaal worden afgegeven. Wanneer het maximale of het minimale volume bereikt is, hoort u mogelijk een optionele signaaltoon.

Het kiezen van een luisterprogramma

Afhankelijk van de luistersituatie passen uw hoortoestellen het geluid automatisch aan.

Uw hoortoestellen hebben mogelijk ook een aantal luisterprogramma's waarmee u het geluid, indien nodig, kunt wijzigen. Een optionele signaaltoon kan de programmawijziging aangeven.

- ▶ Druk kort op de tuimelschakelaar om van hoorprogramma te wisselen.

Zie het hoofdstuk "Bedieningsknoppen" om de tuimelschakelaar in te stellen. Zie het hoofdstuk "Luisterprogramma's" voor een lijst van uw luisterprogramma's.

Het standaard volume wordt toegepast.

Bijkomende aanpassingen (optioneel)

U kunt de bedieningsregelaars van het hoortoestel ook gebruiken om andere parameters te wijzigen, bijvoorbeeld het geluidsvolume van de tinnitusfunctie.

Raadpleeg het hoofdstuk "Bedieningsregelaars" om uw bedieningsregelaars in te stellen.

Opladen

Voor het opladen kunt u kiezen uit drie opties:



-
- ① Charging Station R ③ Charging+ Station R
② Travel Charger RIC
-

- ▶ Plaats uw hoortoestellen in de lader.
- ▶ Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de lader. U vindt ook nuttige oplaadtips in de gebruiksaanwijzing van de oplader.

Indicatie van laag vermogen

U hoort een alarmsignaal dat aangeeft dat de accu bijna leeg is. Dit signaal wordt elke 20 minuten herhaald.

Afhankelijk van het gebruik van uw hoortoestellen beschikt u over ongeveer 1,5 uur om uw hoortoestellen op te laden voordat deze stoppen met werken.

Houd er rekening mee dat de accu sneller leegloopt als er te veel functies tegelijkertijd worden gebruikt.

Oplaadtips

Mogelijk hebt u vragen over hoe u uw hoortoestellen het beste kunt opladen. Lees de vragen en antwoorden hieronder. Als u meer vragen hebt, dan zal uw audicien u hierbij helpen.

Hoe vaak moet ik de hoortoestellen opladen?

Wij bevelen aan om de hoortoestellen dagelijks op te laden, ook als de accu niet leeg is. Laad ze 's nachts op, zodat u uw dag kunt starten met volledig opgeladen hoortoestellen.

Hoe lang duurt het opladen?

Een volledige oplaadcyclus duurt ongeveer 4 uur (+/- 10 min.).

Na 30 minuten kunt u uw hoortoestellen tot 6 uur lang gebruiken.

Oplaadtijden kunnen variëren afhankelijk van het gebruik van de hoortoestellen en de ouderdom van de accu.



Wat gebeurt er wanneer ik ze ben vergeten op te laden?

Uw hoortoestellen worden automatisch uitgeschakeld wanneer de accu leeg is. Laad de hoortoestellen zo snel mogelijk op.

Hoortoestellen die langer dan 6 maanden niet zijn opgeladen, kunnen beschadigd zijn door een niet-herstelbare diepe ontlading van de accu. Diep ontladen accu's kunnen niet meer worden opgeladen en moeten worden vervangen.

Bijzondere luistersituaties

Aan de telefoon

Wanneer u telefoneert, houdt u de telefoonluidspreker iets boven uw oor. Het hoortoestel en de telefoonluidspreker moeten op elkaar uitgelijnd zijn. Draai de luidspreker lichtjes, zodat het oor niet volledig bedekt is.



Telefoonprogramma

Wellicht prefereert u een bepaald volume wanneer u de telefoon gebruikt. Vraag uw audicien om een telefoonprogramma te configureren.

- Schakel over naar het telefoonprogramma wanneer u telefoneert.

Of een telefoonprogramma geconfigureerd is voor uw hoortoestellen, is vermeld in het hoofdstuk "Luisterprogramma's".

Audiostreaming met iPhone

Uw hoortoestellen zijn Made for iPhone hoortoestellen. Dit houdt in dat u met uw hoortoestellen rechtstreeks telefoongesprekken kunt voeren en muziek kunt luisteren vanaf uw iPhone.

Neem contact op met uw audicien voor meer informatie over compatibele iOS-apparaten, koppelen, audiostreaming en andere handige functies.

Audiostreaming met een Android smartphone

Als uw smartphone Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) ondersteunt, kunt u met uw hoortoestellen rechtstreeks telefoongesprekken voeren en naar muziek luisteren vanaf uw smartphone.

Neem contact op met uw audicien voor meer informatie over compatibele Android apparaten, koppelen, audiostreaming en andere handige functies.

Bluetooth

Uw hoorapparaat is uitgerust met Bluetooth draadloze technologie om audiostreaming van mobiele telefoons of andere compatibele apparaten mogelijk te maken.

In een vliegtuig kan het gebruik van Bluetooth functionaliteit worden beperkt, vooral tijdens het opstijgen en landen. Als dit het geval is, kunt u via de smartphone-app Bluetooth draadloze technologie in uw hoortoestellen uitschakelen.

Ringleiding (alleen RIC LI T x80)

Sommige telefoontoestellen en openbare ruimtes zoals theaters bieden het audiosignaal (muziek en spraak) aan via een ringleiding. Met dit systeem kunnen uw hoortoestellen het gewenste signaal rechtstreeks ontvangen – zonder storende omgevingsgeluiden.

Ringleidingen worden meestal aangegeven met speciale borden.



Wanneer u zich in een ruimte bevindt met een ringleiding:

- ▶ schakel over naar het ringleidingprogramma.

Of een ringleidingprogramma geconfigureerd is voor uw hoortoestellen, staat vermeld in het hoofdstuk "Luisterprogramma's".

Onderhoud en verzorging

Om schade te voorkomen is het belangrijk dat u zorg draagt voor uw hoortoestellen en dat u een aantal basisregels volgt. Deze zullen gauw deel gaan uitmaken van uw dagelijkse routine.

Hoortoestellen

Reinigen

Uw hoortoestellen zijn voorzien van een beschermende coating. Als ze echter niet regelmatig worden gereinigd, kunnen de hoortoestellen beschadigd raken of kunnen deze persoonlijk letsel veroorzaken.

- ▶ Reinig uw hoortoestellen dagelijks met een zachte, droge doek.
- ▶ Gebruik nooit stromend water en dompel de toestellen nooit onder in water.
- ▶ Oefen nooit druk uit tijdens het reinigen.
- ▶ Gebruik geen alcoholoplossingen op de laadcontacten.
- ▶ Gebruik om corrosie te voorkomen een zachte, droge doek om zweet of andere vloeistoffen van de laadcontacten en de hoortoestellen te vegen voordat u ze in de oplader doet.
- ▶ Informeer bij uw audicien naar aanbevolen reinigingsprocedures, speciale verzorgingssets en verdere informatie over hoe u uw hoortoestellen in een optimale toestand kunt houden.



Drogen

U kunt gewone producten gebruiken om uw hoortoestellen te drogen. Informeer bij uw audicien naar aanbevolen droogproducten en individuele instructies over wanneer u uw hoortoestellen moet drogen.

Opslag

- Opslag voor korte tijd (tot enkele dagen): Schakel uw hoortoestellen uit met de tuimelschakelaar of plaats ze in de op het stroomnet aangesloten lader.

De lader moet aangesloten zijn op de voedingsbron. Als de lader niet op de voedingsbron is aangesloten en u de hoortoestellen in de lader plaatst, dan worden de hoortoestellen **niet** uitgeschakeld.

Let op: als u de hoortoestellen uitschakelt met een afstandsbediening of smartphone app, dan worden de hoortoestellen **niet** volledig uitgeschakeld. Ze bevinden zich in standby-stand en verbruiken nog een beetje stroom.

- Opslag voor lange tijd (weken, maanden, ...): Laad eerst volledig uw hoortoestellen op. Schakel ze uit via de tuimelschakelaar voor opslag. Wij raden aan om droogproducten te gebruiken bij het opbergen van de hoortoestellen.

Elke 6 maanden moet u de hoortoestellen opladen om een niet-herstelbare diepe ontlading van de accu te voorkomen. Diep ontladen accu's kunnen niet meer worden opgeladen en moeten worden vervangen. Wij

raden aan om de accu's vaker dan om de 6 maanden op te laden.

Houd rekening met de opslagomstandigheden in het hoofdstuk "Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden".

Oorstukjes


Reinigen

Cerumen (oorsmeer) kan zich opstapelen op de oorstukjes. Dit kan de geluidskwaliteit beïnvloeden. Reinig de oorstukjes dagelijks.

Voor alle type oorstukjes:

- ▶ Reinig het oorstukje onmiddellijk na verwijdering met een zachte, droge doek.


Dit voorkomt dat oorsmeer droog en hard wordt.

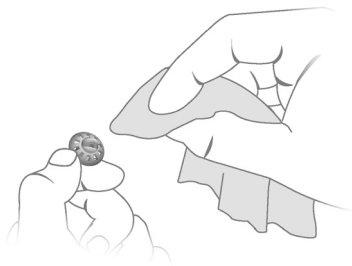


Vervangen

Vervang standaard oorstukjes ongeveer elke drie maanden. Vervang ze eerder als u scheurtjes of andere wijzigingen opmerkt. De procedure voor het vervangen van standaard oorstukjes is afhankelijk van het type oorstukje. In hoofdstuk "Componenten en benamingen", heeft uw audicien uw type oorstukje aangeduid.

- ▶ Om een oude oordop of Sleeve te verwijderen, volgt u de onderstaande afbeelding. Zorg ervoor dat u niet aan de luidsprekerverbinding trekt.

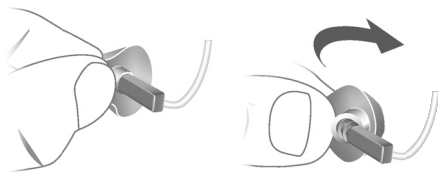

- ▶ Let erop dat de nieuwe oordop of Sleeve de retentieringen van de luidspreker volledig bedekt.
- ▶ Controleer of de nieuwe oordop of Sleeve stevig vastzit.

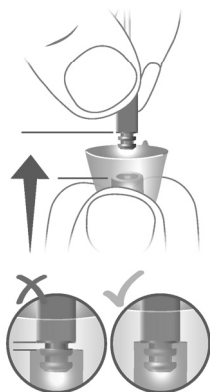

Professioneel onderhoud

Uw audicien kan uw hoortoestellen grondig reinigen en onderhouden.

Op maat gemaakte oorstukjes en cerumenfilters moeten door uw audicien worden vervangen.

Vraag uw audicien naar uw individuele onderhoudstermijnen en ondersteuning.

Belangrijke veiligheidsinformatie



WAARSCHUWING

In uw hoortoestel is permanent een oplaadbare lithium-ionbatterij ingebouwd. Door onjuist gebruik van het hoortoestel kan de oplaadbare batterij barsten.

Risico van letsel, brand of explosie!

- ▶ Volg de veiligheidsinstructies voor oplaadbare lithium-ionbatterijen in dit hoofdstuk.



WAARSCHUWING

Risico van elektrische schok!

- ▶ Sluit de oplader alleen aan met een USB-stroomkabel die voldoet aan IEC 60950-1 en/of IEC 62368-1.



WAARSCHUWING

- ▶ Neem de gebruiksomstandigheden in acht.
- ▶ Let er in het bijzonder op dat u uw toestel beschermt tegen extreme hitte (bv. vuur, magnetron, inductiefornuis of andere hoge inductievelden) en zonlicht.
- ▶ Laad uw hoortoestellen alleen op met een goedgekeurde lader. Vraag uw audicien om hulp.
- ▶ Het toestel niet demonteren.
- ▶ Het toestel niet gebruiken in explosieve omgevingen.
- ▶ Gebruik geen hoortoestellen die vervormd of duidelijk beschadigd zijn.
- ▶ Het toestel niet gebruiken als de prestaties na het opladen sterk verminderen. Breng het toestel terug naar uw audicien.
- ▶ Het toestel niet weggooien in vuur of water.



WAARSCHUWING

- ▶ Deze mag alleen door een specialist worden vervangen en hersteld. Daarom:
- ▶ De oplaadbare lithium-ion-batterij niet zelf herstellen of vervangen.
- ▶ In het onwaarschijnlijke geval dat een oplaadbare lithium-ion-batterij barst of explodeert, alle brandbare materialen buiten bereik houden.

Breng in alle bovenstaande gevallen uw toestel terug naar de audicien.

Meer informatie over de veiligheid vindt u in de veiligheidshandleiding die met het toestel wordt geleverd.



VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- ▶ Draag dit apparaat altijd met een oorstukje.
- ▶ Let erop dat het orgedeelte volledig bevestigd is.



VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- ▶ Doe het apparaat voorzichtig en niet te diep in het oor.



VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- ▶ In zeer zelden voorkomende gevallen kan het oorstukje in uw gehoorgang achterblijven wanneer u het toestel uitneemt. Als dit gebeurt, laat het oorgedeelte dan verwijderen door een medisch specialist.

Meer informatie

Accessoires

U kunt de smartphone app gebruiken voor een comfortabele bediening op afstand van uw hoortoestellen. Verder kunt u de app gebruiken om signaaltönen te deactiveren, individuele geluidsprofielen te creëren en nog veel meer.

U kunt ook een afstandsbediening gebruiken.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.

Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden

De hoortoestellen werken in de volgende omgevingsomstandigheden (geldt ook als de toestellen niet worden gebruikt):

Gebruiksomstandigheden	Ontladen	Opladen
Temperatuur	0-50 °C (32-122 °F)	10-35 °C (50-95 °F)
Relatieve luchtvochtigheid	5-93%	5-93%
Atmosferische druk	700-1060 hPa	700-1060 hPa

Neem tijdens langdurige periodes van transport en opslag de volgende voorwaarden in acht:

	Opslag	Transport
Temperatuur (aanbevolen)	10-25 °C (50-77 °F)	-20-60 °C (-4-140 °F)
Temperatuur (maximaal bereik)	10-40 °C (50-104 °F)	-20-60 °C (-4-140 °F)
Relatieve luchtvochtigheid (aanbevolen)	20-80%	5-90%
Relatieve luchtvochtigheid (maximaal bereik)	10-80%	5-90%
Atmosferische druk	700-1060 hPa	700-1060 hPa

Let op: u moet de hoortoestellen minstens elke 6 maanden opladen. We raden aan om de hoortoestellen elke 3 maanden op te laden. Meer informatie vindt u in hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

Voor andere onderdelen, zoals de oplader, kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.



WAARSCHUWING

Risico van letsel, brand of explosie tijdens verzending.

- ▶ Verzend lithium-batterijen en hoortoestellen volgens de plaatselijke voorschriften.

Verwijderingsinformatie

- ▶ Vermijd milieuvervuiling, gooi geen accu's of toestellen bij het huishoudelijk afval.
- ▶ Recycle of verwijder verpakkingen, accu's en toestellen volgens de lokale voorschriften.

In dit document gebruikte symbolen



Wijst op een situatie die tot ernstige, middelzware of lichte letsels kan leiden.



Maakt u attent op mogelijke materiële schade.



Advies en tips over hoe u beter kunt omgaan met uw toestel.

Made for



iPhone | iPad | iPod

"Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekenen dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen voor een verbinding met een iPod, iPhone of iPad en door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor het functioneren van dit apparaat, of in hoeverre dit voldoet aan de veiligheidsstandaarden en regelgeving. Houd er rekening mee dat het gebruik van deze accessoire met een iPhone, iPad of iPod de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

Probleemoplossing voor hoortoestel

Problemen en mogelijke oplossingen

Het geluid is zwak.

- Verhoog het volume.
- Laad het hoortoestel op.
- Reinig of verwissel het oorstukje.

Het hoortoestel maakt een fluitend geluid.

- Plaats het oorstukje opnieuw tot het stevig zit.
- Verlaag het volume.
- Reinig of verwissel het oorstukje.

Het geluid klinkt vervormd.

- Verlaag het volume.
- Laad het hoortoestel op.
- Reinig of verwissel het oorstukje.

Het hoortoestel geeft signaaltönen af.

- Laad het hoortoestel op.

Het hoortoestel werkt niet.

- Schakel het hoortoestel in.
- Laad het hoortoestel op. Let ook op de status-LED's op de lader.

Neem contact op met uw audicien als u verdere problemen ondervindt.

Specifieke nationale informatie

VS en Canada

Informatie over certificering voor hoortoestellen met draadloze functie:

RIC LI x80, RIC LI T x80

- HVIN: RFM003
- Bevat FCC ID: 2AXDT-RFM003
- Bevat IC: 26428-RFM003



Service en garantie

Serienummers	Hoortoestel	Luidspreker
Links:		
Rechts:		
Servicedatums		
1:	4:	
2:	5:	
3:	6:	
Garantie		
Datum aankoop:		
Garantieperiode in maanden:		
Uw audicien		

 **Wettelijke fabrikant**

WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyngø
Denemarken

WSAUD A/S is een merklicentie van
Specsavers Hearcare Group Ltd.

CE
0123

Document No. 04958-99T01-5400 NL
Order/Item No. 210 172 68
Master Rev01, 02.2022
© 04.2022, WSAUD A/S. All rights reserved

www.specsavers.com

