

Gebruiksaanwijzing

Specsavers
Advance

Your hearing, your way

| Specsavers 90 CZ BTE 105

Achter-het-oor hoortoestellen



Made for

 iPhone | iPad | iPod



Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe hoortoestel. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk Waarschuwingen niet. Dit helpt u het maximale uit uw nieuwe hoortoestel te halen.

Uw hoorzorgprofessional heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat het aan uw behoeften voldoet. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw hoorzorgprofessional.

Een hoorzorgprofessional* (hoortoestel-professional, audioloog, KNO-arts (keel, neus en oor) en audicien) is een persoon die goed is opgeleid en die beschikt over de bekwaamheid om gehoor te testen, hoortoestellen te selecteren en aan te passen en revalidatiezorg te leveren aan personen met gehoorverlies.

De opleiding van de hoorzorgprofessional is in overeenstemming met nationale of regionale regelgeving.

* De functietitel kan van land tot land verschillen.

Overzicht hoortoestellen

Deze gids geldt voor de volgende hoortoestelfamilies en modellen:

Specsavers 90 CZ (FW4.1)

- Specsavers 190 - CZ1 B 105
GTIN: (01)05714464061723

Beoogd gebruik

| | |
|----------------------------------|---|
| Beoogd gebruik | Het hoortoestel is bedoeld voor het versterken en overbrengen van geluid naar het oor. |
| Aanwijzingen voor gebruik | Bilateraal of eenzijdig gehoorverlies van het perceptief, conductief of gemengd type, variërend van een lichte (16 dB HL*) tot een ernstige (85 dB HL*) mate van gehoorverlies, met een individuele frequentieconfiguratie. |
| Beoogde gebruiker | Personen met gehoorverlies die een hoortoestel dragen en hun zorgverleners. Hoorzorgprofessional die verantwoordelijk is voor het afstellen van het hoortoestel. |
| Beoogde gebruikersgroep | Volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden. |
| Gebruiksomgeving | Binnens- en buitenshuis. |
| Contra-indicaties | Niet geschikt voor baby's jonger dan 36 maanden. Gebruikers van actieve implantaten dienen op te letten bij gebruik van het hoortoestel. Lees voor meer informatie het hoofdstuk Waarschuwingen . |
| Klinische voordelen | Het hoortoestel is ontworpen om beter verstaan van spraak te bieden om de communicatie te vergemakkelijken met als doel de levenskwaliteit te verbeteren. |

* Zoals gespecificeerd door de American Speech-Language-Hearing Association, asha.org, waarbij gebruik wordt gemaakt van een zuivere toon gemiddelde fde (PTA) van 0,5, 1 en 2 kHz.

BELANGRIJKE OPMERKING

De versterking van het hoortoestel wordt door uw hoorzorgprofessional tijdens het aanpassen van het hoortoestel speciaal afgestemd op en geoptimaliseerd voor uw persoonlijke hoorvermogen.

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Nagaan welk hoortoestel en welk oorstukje u heeft | 10 |
| Wat het doet | 13 |
| Uw hoortoestel met miniFit thin tube | 14 |
| Nagaan wat het linker- en rechterhoortoestel is | 16 |
| Batterijtype (formaat 13) | 17 |
| Het hoortoestel AAN- en UITzetten | 18 |
| Wanneer moet u de batterij vervangen | 19 |
| Vervang de batterij | 20 |
| Het hoortoestel met toonbocht indoen | 22 |
| MultiTool voor batterijvervanging en schoonmaken | 23 |
| Uw hoortoestellen onderhouden | 24 |
| miniFit thin tube | 27 |
| Standaard oorstukjes voor de thin tube | 30 |
| Dome of Grip Tip vervangen | 31 |
| Op maat gemaakte oorstukjes voor thin tube | 32 |
| Schoonmaken Micro Mold | 33 |
| ProWax filter vervangen | 34 |
| Vliegtuigmodus | 35 |
| Optionele functies en accessoires | 36 |

Inhoudsopgave


| | |
|--|----|
| Het volume aanpassen (optioneel) | 37 |
| Van programma wisselen (optioneel) | 38 |
| Het hoortoestel dempen (optioneel) | 40 |
| Snelle reset en koppelingsstand | 41 |
| Hoortoestel gebruiken met iPhone, iPad en iPod touch | 42 |
| Hoortoestel koppelen met iPhone | 43 |
| Verbind uw hoortoestellen opnieuw met uw iPhone, iPad of iPod touch | 46 |
| Draadloze accessoires (optioneel) | 47 |
| Overige opties (optioneel) | 48 |
| Kindveilige batterijlade (optioneel) | 49 |
| Tinnitus SoundSupport (optioneel) | 51 |
| Richtlijnen voor Tinnitus SoundSupport gebruikers | 52 |
| Geluidsopties en volumeregeling | 53 |
| Tijdsbeperkingen voor gebruik | 55 |
| Belangrijke informatie voor hoorzorgprofessionals over Tinnitus SoundSupport | 56 |
| Waarschuwingen met betrekking tot Tinnitus SoundSupport | 58 |

| | |
|--|----|
| Algemene Waarschuwingen | 60 |
| Troubleshooting guide | 68 |
| Water- en stofbestendig (IP68) | 70 |
| Gebruiksomstandigheden | 71 |
| Garantie | 72 |
| Technische informatie | 74 |
| Uw individuele hoortoestelinstellingen | 76 |


Nagaan welk hoortoestel en welk oorstukje u heeft

Er zijn twee verschillende accessoires en diverse oorstukjes die gebruikt kunnen worden met uw hoortoestel. Kijk alstublieft welke accessoire en oorstukje u heeft. Dit maakt het makkelijker om deze gebruiksaanwijzing door te lezen.

Toonbocht met oorstukje

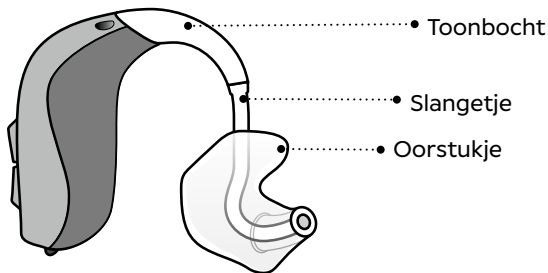

miniFit thin tube

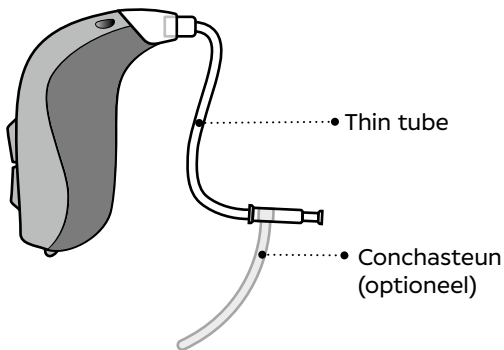

Oorstukjes

De thin tube maakt gebruik van een van de volgende oorstukjes:



Dome (Bass Dome op afbeelding)*



Grip Tip*




VarioTherm® micro mould




Micro mould

* Ga voor meer details over het vervangen van de dome of Grip Tip naar de paragraaf: "Dome of Grip Tip vervangen". VarioTherm® is een geregistreerd handelsmerk van Dreve.

Uw hoortoestel met toonbocht en oorstukje

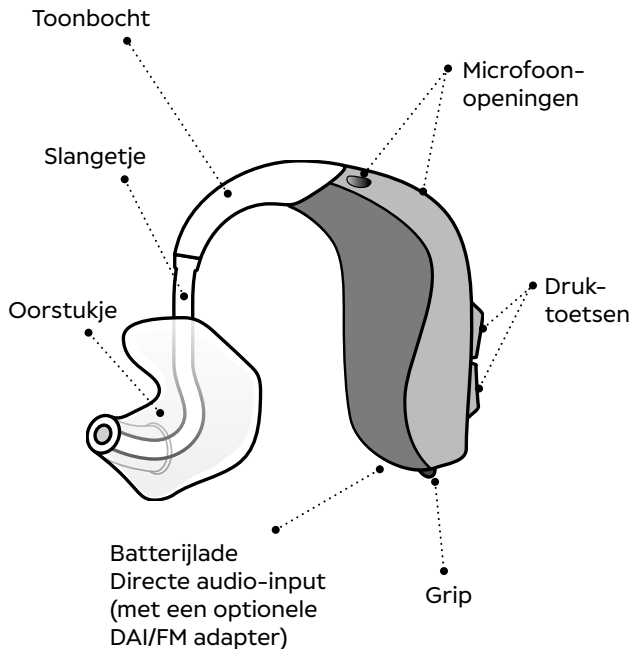


Wat het doet

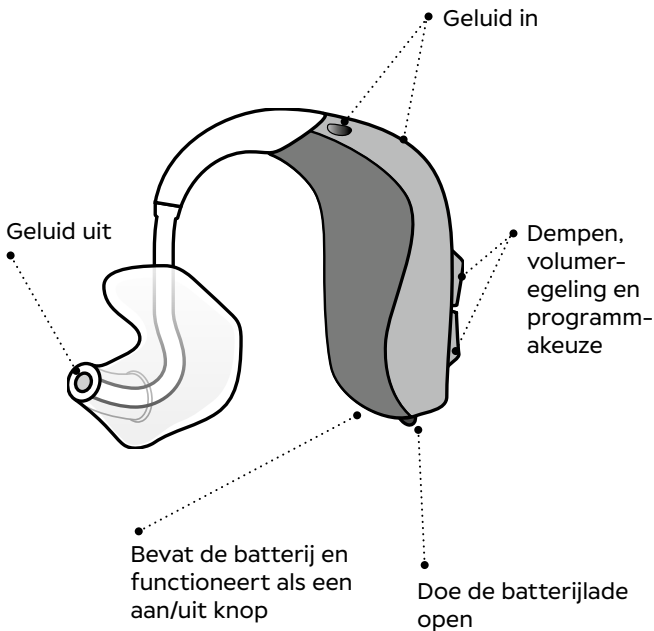


Uw hoortoestel met miniFit thin tube

Wat het is

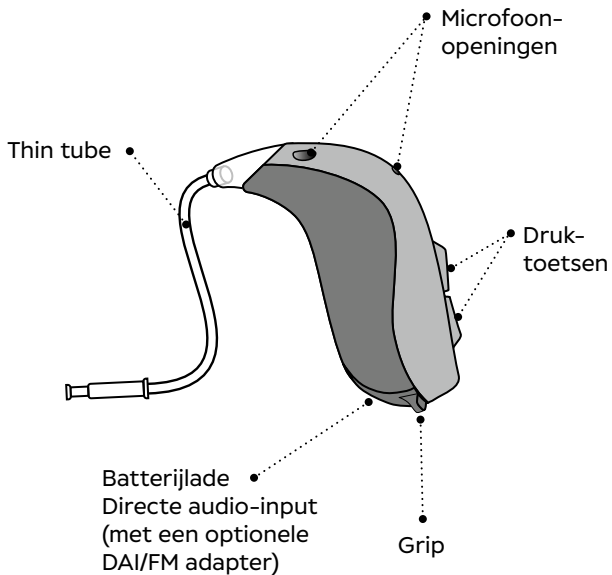


Wat het doet

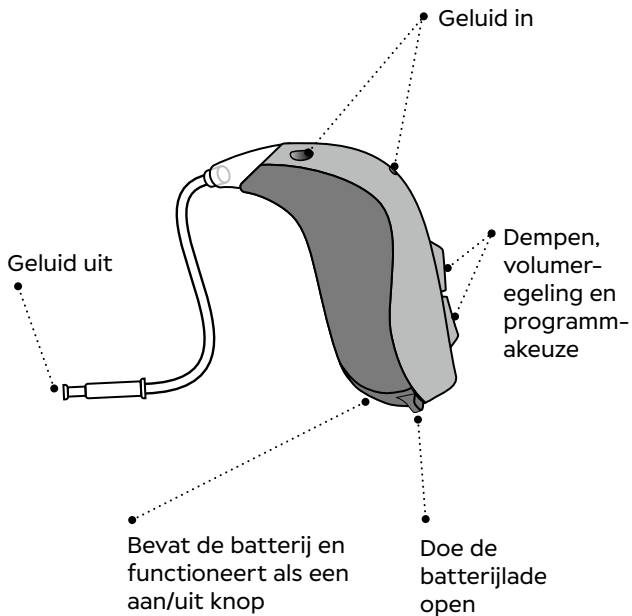

Nagaan wat het linker- en rechterhoortoestel is

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het linker- en rechterhoortoestel omdat ze mogelijk verschillend geprogrammeerd zijn. Er bevinden zich links/rechts kleurmarkeringen op de batterijlade. De kleurmarkeringen kunnen ook worden gevonden op de oorstukjes.

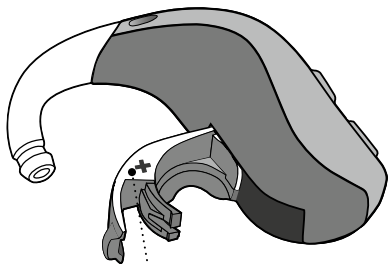


- Een **RODE** stip markeert het RECHTER-hoortoestel

Een **BLAUWE** stip markeert het LINKER-hoortoestel

Batterijtype (formaat 13)

Uw hoortoestel is een elektronisch apparaatje dat op speciale batterijen werkt. Plaats een nieuwe batterij in de batterijlade om het hoortoestel te activeren. Raadpleeg het hoofdstuk “De batterij vervangen” om te zien hoe u dat moet doen.

Zorg ervoor dat de plus zichtbaar is

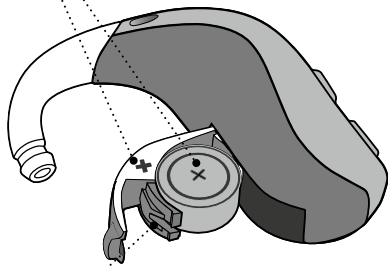

Trekken om te openen


Batterijlade

Het hoortoestel AAN- en UITzetten

De batterijlade wordt gebruikt voor het aan- en uitzetten van het hoortoestel. Om de batterij te sparen zorgt u dat het hoortoestel is uitgeschakeld als u het niet draagt.


AANZETTEN

Doe de batterijlade dicht.

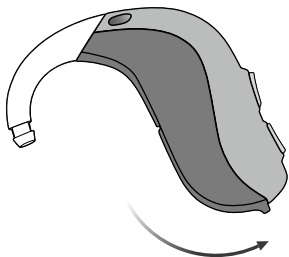

UITZETTEN

Doe de batterijlade open.

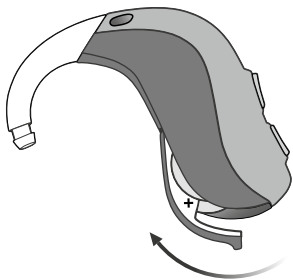

Wanneer moet u de batterij vervangen

Als het tijd is om de batterij te verwisselen, hoort u drie pieptonen die met regelmatige tussenpozen herhaald worden totdat de batterij leeg is.



Drie piepjes*
= de batterij is bijna leeg



Vier piepjes
= de batterij is leeg

Batterij tip

Om ervoor te zorgen dat het hoortoestel altijd werkt, adviseren we reserve batterijen bij u te dragen of de batterij te vervangen voordat u van huis vertrekt.

* Bluetooth® wordt uitgeschakeld en het is niet mogelijk om draadloze accessoires te gebruiken.


Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn geregistreerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG., Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Demant A/S vindt plaats onder licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn in eigendom van hun respectievelijke eigenaren.



De batterijen moeten vaker worden vervangen als u audio of muziek naar uw hoortoestel streamt.

Vervang de batterij


- 1. Oude batterij verwijderen**
Open de batterijlade volledig.
Verwijder de oude batterij.

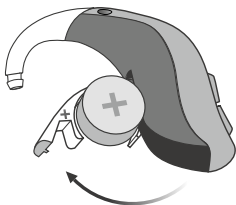


- 2. Sticker verwijderen**
Haal de sticker van de +-zijde
van de nieuwe batterij.

Tip:

Wacht 2 minuten zodat
de batterij kan ventileren
om optimale werking te
garanderen.

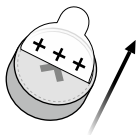


- 3. Nieuwe batterij plaatsen**
Plaats de nieuwe batterij in de
batterijlade. Zorg ervoor dat
de +-zijde omhoog gericht is.

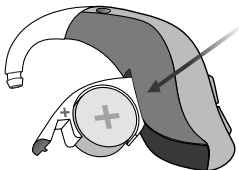


4. Gesloten

Sluit de batterijlade. Het hoortoestel speelt via het oorstukje een melodietje af. Houd het oorstukje dichtbij uw oor om het melodietje te kunnen horen.

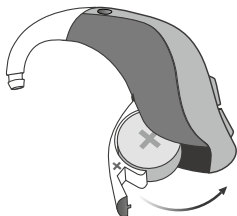

Tip

De MultiTool kan gebruikt worden voor het vervangen van de batterij. Gebruik het magnetische uiteinde om de batterijen te verwijderen en te plaatsen. De MultiTool is verkrijgbaar bij uw hoorzorgprofessional.

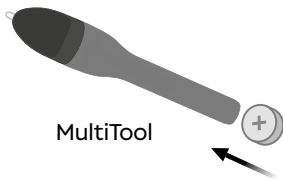

Het hoortoestel met toonbocht indoen

Lees de volgende pagina's als u een hoortoestel heeft met een toonbocht en een oorstukje.

Het oorstukje is voor u op maat gemaakt en past in uw oor. De oorstukjes zijn uniek voor het linker- en rechteroor.

Stap 1

Trek uw oor voorzichtig iets naar buiten en druk het oorstukje in de gehoorgang, terwijl u het tegelijkertijd licht heen en weer draait.




Stap 2

Plaats het hoortoestel achter uw oor.



MultiTool voor batterijvervanging en schoonmaken

De MultiTool is voorzien van een magneet waardoor het gemakkelijk is om de batterij van het hoortoestel te vervangen. Het bevat ook een borstel en een draad voor het reinigen en verwijderen van oorsmeer uit het oorstukje. Als u een nieuwe MultiTool nodig heeft, neem dan contact op met uw hoorzorgprofessional.

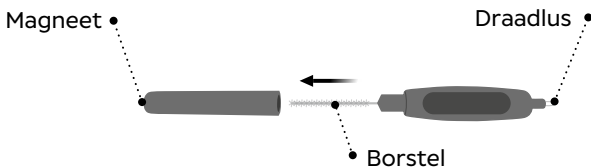

BELANGRIJKE OPMERKING


Uw MultiTool heeft een ingebouwde magneet. Houd de MultiTool minimaal 30 centimeter verwijderd van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

Uw hoortoestellen onderhouden

Houd uw hoortoestel tijdens het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet beschadigd raakt als u het laat vallen.

De microfoonopeningen schoonmaken

Borstel voorzichtig het vuil weg uit de openingen met een schone borstel. Borstel voorzichtig het oppervlak schoon en zorg ervoor dat de borstel niet in de openingen wordt geduwd.

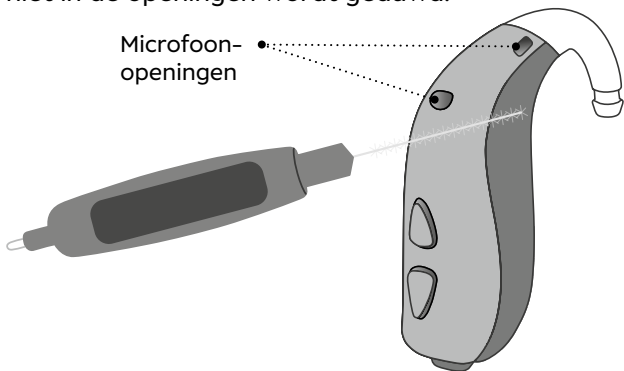


BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van het hoortoestel. Het hoortoestel mag nooit worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

Het oorstukje schoonmaken

De oorstukjes moet regelmatig worden schoongemaakt. Gebruik een zachte doek om het oppervlak van het oorstukje schoon te maken. Gebruik de draadlus van de MultiTool om de opening schoon te maken.

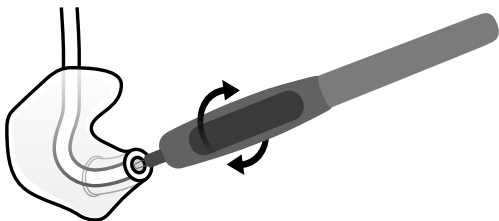

Het slangetje vervangen

Het slangetje tussen het oorstukje en het hoortoestel moet worden vervangen als het vergeelt of stug wordt. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor vervanging van het slangetje.

Het oorstukje reinigen


Stap 1

Zorg ervoor dat u weet welk oorstukje bij welk toestel hoort voordat u het oorstukje van het hoortoestel loskoppelt.




Stap 2

Maak het slangetje en het oorstukje los van de toonbocht. Houd de toonbocht stevig vast als u het slangetje lostrekt, om schade aan het hoortoestel te voorkomen.

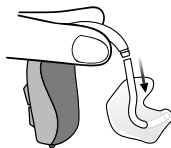

Stap 3


Reinig het oorstukje en het slangetje met een milde zeepoplossing. Spoel het af en maak het goed droog voordat u het weer met het hoortoestel verbindt.

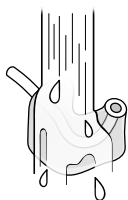

miniFit thin tube

Lees de volgende pagina's als uw hoortoestel een miniFit thin tube heeft met een dome, Grip Tip of Micro Mold als oorstukje.


miniFit is een dun slangetje dat het geluid naar uw oor brengt. De thin tube moet altijd in combinatie met een oorstukje worden gebruikt. Gebruik alleen onderdelen die specifiek bestemd zijn voor uw hoortoestel.

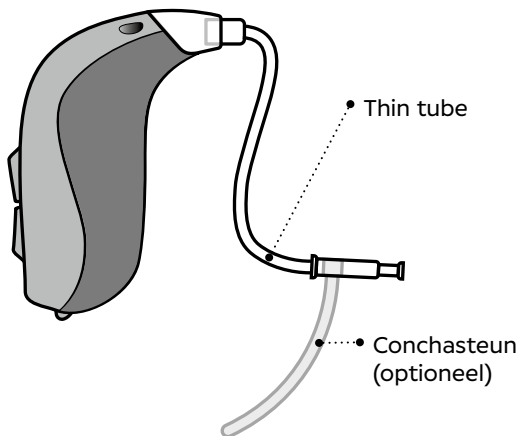

Het hoortoestel met de thin tube indoen


Stap 1

Plaats het hoortoestel achter uw oor.

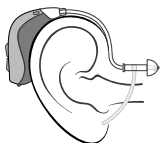

Stap 2

Houd de bocht van het slangetje tussen uw duim en wijsvinger. Het oorstukje moet richting de opening van de gehoorgang wijzen.

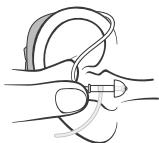

Stap 3

Druk het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang tot de thin tube dicht tegen de zijkant van uw hoofd zit. Als de thin tube een conchasteun heeft, plaats deze dan in het oor zodat het de ronding van het oor volgt.




De thin tube schoonmaken

De thin tube moet worden schoongemaakt om het vrij te houden van vocht en oorsmeer. Als het niet wordt schoongemaakt, kan het verstopt raken met oorsmeer waardoor er geen geluid meer uitkomt.


Stap 1

Trek de thin tube van het hoortoestel.

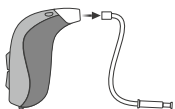


Stap 2

Druk het schoonmaakgereedschap helemaal door de thin tube.

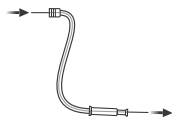

Stap 3

Bevestig de thin tube weer aan het hoortoestel.

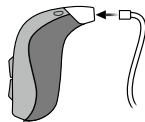

Standaard oorstukjes voor de thin tube

Er zijn 3 verschillende soorten domes. De dome en Grip Tip zijn beide van zacht rubber gemaakt. Controleer uw type oorstukje en maat hieronder.



Open Dome



Power Dome



Bass Dome, single vent



Bass Dome, double vent



Grip Tip (verkrijgbaar in small en large, links en rechts, met of zonder venting)



6 mm



8 mm



10 mm



12 mm*


* niet voor een Open dome

Dome of Grip Tip vervangen

Een dome of Grip Tip mag niet gereinigd worden. Wanneer het vol zit met oorsmeer moet deze worden vervangen door een nieuwe. Wij raden aan de Grip Tip ten minste één keer per maand te vervangen.


Stap 1

Pak de thin tube aan het uiteinde vast en trek de dome eraf.

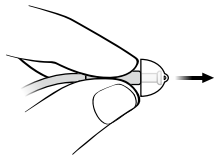


Stap 2

Plaats de thin tube precies in het midden van de dome voor een stevige bevestiging.

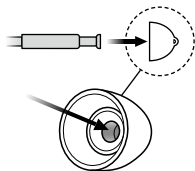

Stap 3

Druk de dome goed aan om ervoor te zorgen dat het stevig vast zit.

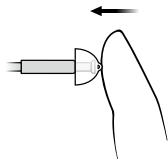


BELANGRIJKE OPMERKING

Als het oorstukje niet op de luidspreker zit wanneer deze uit het oor wordt verwijderd, kan het zijn dat het oorstukje in de gehoorgang is achtergebleven. Neem voor verdere instructies contact op met uw hoorzorgprofessional.

Op maat gemaakte oorstukjes voor thin tube

Micro Molds zijn beschikbaar in twee verschillende materialen. De oorstukjes worden op maat gemaakt voor uw oor.

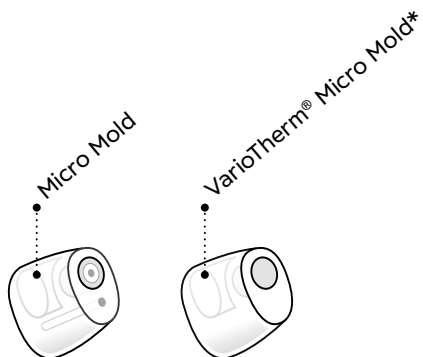


Op maat gemaakte oorstukjes hebben een wit oorsmeerfilter in de geluidsopening bevestigd. Met deze oorstukjes moet het type ProWax filter worden gebruikt. Voor het vervangen van het Prowax filter, zie de paragraaf “ProWax filter vervangen”.

* VarioTherm® Micro Mold heeft geen oorsmeerfilter.

Schoonmaken Micro Mold

De Micro Mold moet regelmatig worden schoongemaakt.

De Micro Mold heeft een wit oorsmeerfilter dat moet worden vervangen wanneer dit verstopt is of als het hoortoestel het niet doet.

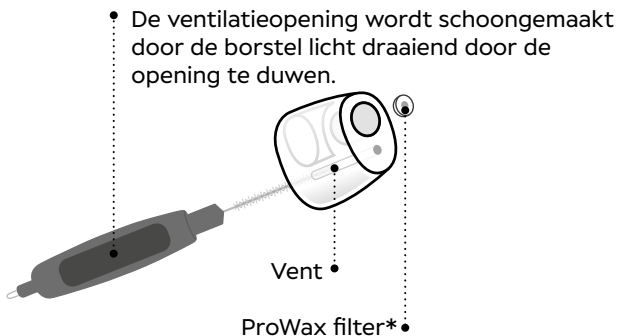

* VarioTherm® Micro Mold en Lite Tip hebben geen oorsmeerfilter.


BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik altijd hetzelfde type oorsmeerfilter als het origineel dat bij het hoortoestel wordt geleverd. Als u twijfelt over het gebruiken of vervangen van uw oorsmeerfilter, neemt u dan contact op met uw hoorzorgprofessional.

ProWax filter vervangen


1. Tool

Verwijder de tool uit de behuizing. De tool heeft twee pinnetjes, één lege voor het verwijderen van het filter en één met het nieuwe oorsmeerfilter.

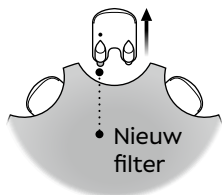


2. Oude filter verwijderen

Duw het lege pinnetje in het oorsmeerfilter in de mould en trek het eruit.

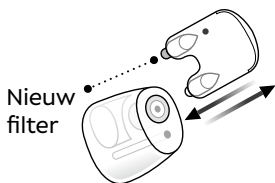


3. Nieuwe filter plaatsen

Plaats het nieuwe oorsmeerfilter met behulp van het andere pinnetje, verwijder de tool en gooi het weg.

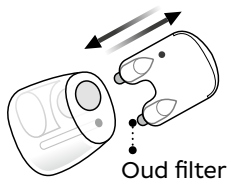

Vliegtuigmodus

Wanneer u in een vliegtuig stapt of een ruimte betreedt waar het verboden is radiosignalen uit te stralen, bijv. tijdens een vlucht, moet de vliegtuigmodus worden ingeschakeld. Het hoortoestel werkt dan nog steeds. Het is slechts noodzakelijk om de vliegtuigmodus op één hoortoestel te activeren.

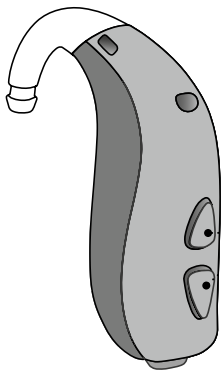

- **De vliegtuigmodus activeren en deactiveren**

Houd een van de druktoetsen minstens 7 seconden ingedrukt. Een melodietje bevestigt uw actie.

Het openen en sluiten van de batterijlade zal ook de vliegtuigmodus deactiveren. Zie paragraaf “Snelle reset”.



Optionele functies en accessoires

De functies en accessoires die op de volgende pagina's worden beschreven, zijn optioneel. Neem contact op met uw hoorzorgprofessional om erachter te komen hoe uw hoortoestel is geprogrammeerd. Als u te maken heeft met moeilijke luistersituaties kan een speciaal programma nuttig zijn. Deze worden door uw hoorzorgprofessional geprogrammeerd.

Noteer luistersituaties waarbij u hulp nodig heeft.

Het volume aanpassen (optioneel)

Met behulp van de druktoets kunt u het volume aanpassen. U hoort een klik als u het volume verhoogt of verlaagt.

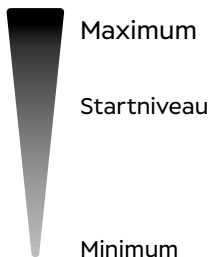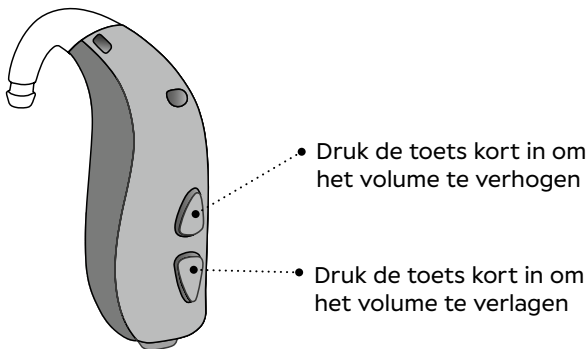

U hoort 2 piepjes bij het startniveau.
U hoort 3 piepjes bij Maximum en Minimum.

Aanpassen volume


Links

Rechts

In te vullen door uw hoorzorgprofessional.





□ **Van programma wisselen (optioneel)**

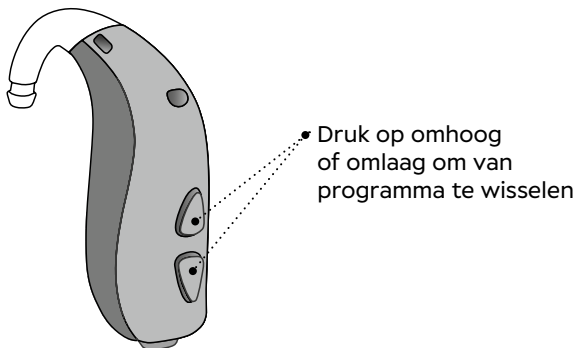Uw hoortoestel heeft maximaal 4 verschillende programma's. Deze worden door uw hoorzorgprofessional geprogrammeerd.



U kunt continu tussen programma's schakelen, zowel via de omhoog-toets als via de omlaag-toets in de volgorde van de ingestelde programma's. Als u bijvoorbeeld van programma 1 naar programma 4 wilt wisselen, dan kunt u op de omlaag-toets drukken in plaats van 3 keer op de omhoog-toets te drukken.

In te vullen door de hoorzorgprofessional

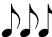
| Programma | Geluid dat u hoort wanneer dit programma geactiveerd wordt | Wanneer te gebruiken |
|-----------|---|----------------------|
| 1 |  "1 piepje" | |
| 2 |  "2 piepjes" | |
| 3 |  "3 piepjes" | |
| 4 |  "4 piepjes" | |

Van programma wisselen:

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts | <input type="checkbox"/> Kort drukken | <input type="checkbox"/> Middellang drukken |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|

□ **Het hoortoestel dempen (optioneel)**

U kunt de 'mute'-functie gebruiken om het hoortoestel te dempen terwijl u het in heeft.

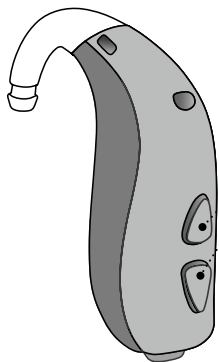

• Druk lang op een van de druktoetsen (4 seconden) om het hoortoestel te dempen.

Door kort op de toets te drukken, kunt u het hoortoestel weer activeren.

Uw hoortoestel kan gedempt worden door een van de volgende optionele producten te gebruiken:

- RemoteLink app
- SoundClip-A
- RC-A afstandsbediening

BELANGRIJKE OPMERKING


Gebruik de dempfunctie niet om het hoortoestel UIT te zetten; het hoortoestel gebruikt in deze modus nog steeds stroom.

Snelle reset en koppelingsstand


U kunt de standaardinstellingen van uw hoortoestel, zoals die door uw hoorzorgprofessional zijn geprogrammeerd, eenvoudig herstellen. Dit doet u door de batterijlade te openen en te sluiten. U hoort een melodietje bij het resetten van het hoortoestel.

Om uw hoortoestel met een draadloze accessoire te koppelen, moet uw hoortoestel in de koppelingsstand staan. U doet dit door de batterijlade te openen en sluiten. Het hoortoestel zal 180 seconden in de koppelingsstand blijven staan. Alle compatibele accessoires staan genoemd in hoofdstuk “Draadloze accessoires”.

Open

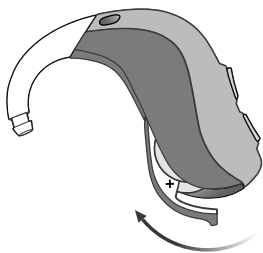

Gesloten

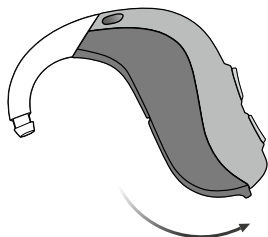

Hoortoestel gebruiken met iPhone, iPad en iPod touch

Uw hoortoestel is een Made for iPhone® hoortoestel waardoor directe communicatie met en bediening via een iPhone®, iPad® of iPod® touch mogelijk is.

Voor ondersteuning bij het gebruik van deze producten met uw hoortoestel, kunt u uw hoorzorgprofessional raadplegen, of bezoekt u onze support site op:

www.sbohearing.com/download-center/specsavers

Voor informatie over compatibiliteit kunt u terecht op:


www.sbohearing.com/compatibility/specsavers



Rechtstreeks audio streamen wordt momenteel niet ondersteund door Android™.


Hoortoestel koppelen met iPhone

1. Instellingen

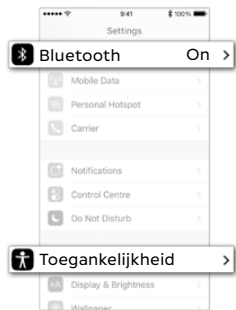


Open uw iPhone en ga naar “Instellingen”. Let erop dat Bluetooth® aan staat. Kies dan “Toegankelijkheid”.

2. Toegankelijkheid

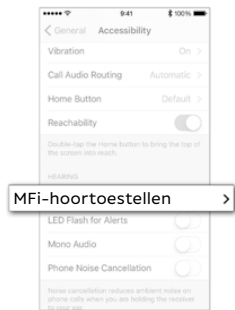


In het scherm “Toegankelijkheid”, kiest u “MFi-hoortoestellen”.

3. Voorbereiden

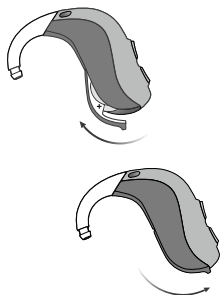

Open en sluit de batterijlade, bij beide hoortoestellen als u er twee heeft, en plaats ze dichtbij uw iPhone. Het hoortoestel blijft 3 minuten in de koppelingsstand staan.

4. Selecteren

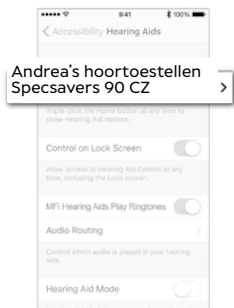

Uw iPhone zal het hoortoestel detecteren voor koppeling. Gedetecteerde apparaten verschijnen in uw iPhone lijst. Kies uw hoortoestel.

5. Bevestig koppeling



Bluetooth
koppelingsverzoek
Specsavers 90 CZ
wil met je iPhone
koppelen

Annuleren Koppelen

Bevestig koppeling.
Indien u twee
hoortoestellen
heeft, is bevestiging
van koppeling
vereist voor ieder
hoortoestel.

Verbind uw hoortoestellen opnieuw met uw iPhone, iPad of iPod touch

Als u uw hoortoestellen, iPhone, iPad, of iPod touch uitzet, zijn ze niet langer met elkaar verbonden. Om ze opnieuw met elkaar te verbinden, zet u uw hoortoestellen aan door de batterijlade te openen en sluiten. De hoortoestellen zullen dan automatisch opnieuw verbinding maken met uw Apple apparaat.

Het gebruik van de Made for Apple badge betekent dat een accessoire speciaal is ontworpen om verbinding te maken met de Apple producten geïdentificeerd in de badge en dat de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het beantwoorden ervan aan de veiligheidsnormen en voorschriften.

Apple, het Apple logo, iPhone, iPad, en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Android, Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Draadloze accessoires (optioneel)

Als aanvulling op uw hoortoestel is een groot aantal draadloze accessoires verkrijgbaar. Zij kunnen u helpen beter te horen en communiceren in een groot aantal alledaagse situaties.

SoundClip-A

Wanneer dit accessoire met uw mobiele telefoon gekoppeld wordt, kunt u de hoortoestellen als stereo hoofdtelefoon gebruiken. SoundClip-A kan ook als externe microfoon en als afstandsbediening gebruikt worden.

TV-A

TV-A Adapter is een draadloze zender van geluiden van de televisie en elektronische audio-apparaten. De TV-A stuurt geluid rechtstreeks naar uw hoortoestel.

RC-A

Met de RC-A afstandsbediening kunt u tussen programma's schakelen, het volume van uw hoortoestel aanpassen of uw hoortoestel dempen.

RemoteLink app

Met de app kunt u uw hoortoestel bedienen vanaf uw mobiele telefoon of tablet. Voor iPhone, iPad, iPod touch en Android-apparaten.

Zorg ervoor dat u RemoteLink app alleen downloadt en installeert via de officiële app stores.

Neem voor meer informatie contact op met uw hoorzorgprofessional.

Overige opties (optioneel)

Luisterspoel

Met een luisterspoel kunt u beter horen als u een telefoon met ingebouwde ringleiding gebruikt of wanneer u in een gebouw met een ringleidingsysteem bent, zoals een schouwburg, kerk of collegezaal. Dit symbool of een vergelijkbaar teken wordt weergegeven op plaatsen waar een ringleidingsysteem aanwezig is.



Autophone

Autophone in het hoortoestel kan geactiveerd worden als uw telefoon een speciale magneet bevat. De magneet moet naast de geluidsuitgang op uw telefoon worden geplaatst.



Directe audio-input (DAI) adapter

Maakt het mogelijk om met hoortoestellen direct signalen te ontvangen van externe bronnen zoals TV, muziek, etc.

FM adapter

Maakt het mogelijk om hoortoestellen te verbinden met een externe FM receiver.

Neem voor meer informatie contact op met uw hoorzorgprofessional.

BELANGRIJKE OPMERKING

Wanneer de DAI adapter is aangesloten op een audiobron op netvoeding, dient de audiobron in overeenstemming te zijn met IEC 62368-1 of equivalente veiligheidsstandaarden.

Kindveilige batterijlade (optioneel)


Om de batterij buiten bereik van kleine kinderen en mensen met een verstandelijke beperking te houden, dient er een kindveilige batterijlade op het hoortoestel te worden gebruikt.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik geen overmatige kracht om de batterijlade te openen wanneer deze vergrendeld is. Forceer de batterijlade niet wanneer deze reeds volledig geopend is. Zorg ervoor dat u de batterij juist plaatst. Neem contact op met uw hoorzorgprofessional als u vermoedt dat de kindveilige batterijlade minder effectief is en minder goed vergrendeld kan worden.


De batterijlade vergrendelen

Sluit de batterijlade volledig en controleer of het is vergrendeld.

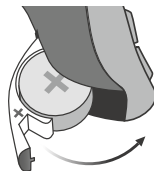

Gereedschap om de batterijlade te ontgrendelen


Gebruik dit tooltje dat wordt geleverd door uw hoorzorgprofessional.

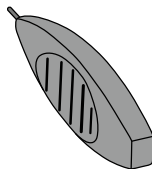

De batterijlade ontgrendelen

Steek de punt van het tooltje in het kleine gat achter de batterijlade.

1. Beweeg het naar rechts en houd het daar.
2. Doe de batterijlade open.

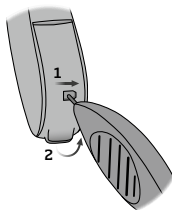

Tinnitus SoundSupport (optioneel)

Beoogd gebruik van Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport is een hulpmiddel dat geluiden genereert om tijdelijk verlichting te brengen voor mensen die lijden aan tinnitus als onderdeel van een tinnitus management programma.

Het is bedoeld voor volwassenen (18 jaar of ouder).

Tinnitus SoundSupport is bestemd voor erkende hoorzorgprofessionals (audiologen, hoortoestelspecialisten of KNO-artsen) die bekend zijn met het beoordelen en behandelen van tinnitus en gehoorverlies. De aanpassing van Tinnitus SoundSupport moet worden uitgevoerd door een professional die deelneemt aan een tinnitus managementprogramma.

Richtlijnen voor Tinnitus SoundSupport gebruikers

Deze instructies bevatten informatie over Tinnitus SoundSupport. Uw hoorzorgprofessional kan dit geactiveerd hebben in uw hoortoestellen.

Tinnitus SoundSupport is een tinnitus management-apparaat dat bedoeld is om geluid van voldoende intensiteit en bandbreedte te genereren om te helpen tinnitus beheersbaar te maken.

Uw hoorzorgprofessional kan u ook de juiste nazorg bieden. Het is belangrijk dat u het advies en de aanwijzingen voor wat betreft deze nazorg opvolgt.

Uitsluitend voor gebruik op voorschrift

Een persoon die meldt last te hebben van tinnitus dient volgens goed gebruik in de gezondheidszorg vóór het gebruik van een geluidsgenerator een medische beoordeling door een erkende oorarts te ondergaan. Deze beoordeling heeft tot doel om er zeker van te zijn dat alle medisch behandelbare klachten die tinnitus kunnen veroorzaken, onderkend en behandeld zijn vóór het gebruik van de geluidsgenerator.

Geluidsopties en volumeregeling

Tinnitus SoundSupport wordt door uw hoorzorgprofessional geprogrammeerd overeenkomstig uw gehoorverlies en voorkeuren voor tinnitusverlichting. Het heeft een aantal verschillende geluidsopties. U selecteert samen met uw hoorzorgprofessional het/de gewenste geluid(en).

Tinnitus SoundSupport programma's

U beslist samen met uw hoorzorgprofessional in welke programma's u Tinnitus SoundSupport geactiveerd wilt hebben. De geluidsgenerator kan in maximaal vier verschillende programma's worden geactiveerd.

Dempen

Als u zich in een programma bevindt waarvoor Tinnitus SoundSupport geactiveerd is, zal de 'mute'-functie alleen het omgevingsgeluid dempen en niet het geluid van Tinnitus SoundSupport. Zie hoofdstuk: "Het hoortoestel dempen".

Volumeregeling met Tinnitus SoundSupport

Als u een hoortoestelprogramma selecteert waarvoor Tinnitus SoundSupport geactiveerd is, kan uw hoorzorgprofessional de druktoets op uw hoortoestel alleen instellen om te functioneren als volumeregeling voor het verlichtende tinnitusgeluid.

Uw hoorzorgprofessional kan de volumeregeling voor de geluidsgenerator op twee manieren instellen:

- A) het volume voor ieder oor afzonderlijk aanpassen, of
- B) het volume in beide oren tegelijkertijd aanpassen.

A) Het volume van Tinnitus SoundSupport in ieder oor afzonderlijk aanpassen

Om het geluidsvolume te verhogen (op slechts één hoortoestel), druk herhaaldelijk kort op de bovenste druktoets tot het gewenste niveau is bereikt. Om het geluidsvolume te verlagen (op slechts één hoortoestel), druk herhaaldelijk kort op de onderste druktoets tot het gewenste niveau is bereikt.

B) Het volume van Tinnitus SoundSupport in beide oren tegelijkertijd aanpassen

U kunt één hoortoestel gebruiken om het geluid harder/zachter te zetten in beide hoortoestellen. Als u het volume in één hoortoestel aanpast, volgt het volume van het andere hoortoestel. Om het volume te verhogen drukt u herhaaldelijk kort op de bovenste druktoets. Om het volume te verlagen drukt u herhaaldelijk kort op de onderste druktoets.

In te vullen door uw hoorzorgprofessional.

Tijdsbeperkingen voor gebruik

Dagelijks gebruik

Het volumenniveau van Tinnitus SoundSupport kan ingesteld worden op een niveau dat tot permanente gehoorbeschadiging kan leiden als het voor langere tijd wordt gebruikt. Uw hoorzorgprofessional zal u adviseren over de maximale tijd per dag dat u Tinnitus SoundSupport dient te gebruiken. Het dient nooit op een oncomfortabel niveau gebruikt te worden.

Zie tabel "Tinnitus SoundSupport: Gebruiksbeperking" "Uw individuele hoortoestelinstellingen" aan het einde van dit boekje om te weten te komen hoeveel uur per dag u veilig gebruik kunt maken van de verlichtende geluiden in uw hoortoestellen.

Belangrijke informatie voor hoorzorgprofessionals over Tinnitus SoundSupport

Omschrijving van het apparaat

Tinnitus SoundSupport is een functiemodule die door een hoorzorgprofessional in de hoortoestellen geactiveerd kan worden.

Maximale draagtijd

De draagtijd van Tinnitus SoundSupport wordt minder als het niveau boven de 80 dB(A) SPL komt. De aanpassoftware toont automatisch een waarschuwing als het hoortoestel boven de 80 dB(A) SPL komt. Zie “Draagtijdindicatie” boven het Tinnitus SoundSupport aanpasscherm in de aanpassoftware.

De volumeregeling is gedeactiveerd

De volumeregeling voor de geluidsgenerator is standaard gedeactiveerd in het hoortoestel. Risico op blootstelling aan lawaai is groter wanneer de volumeregeling is geactiveerd.

Als de volumeregeling is geactiveerd

Er kan een waarschuwing worden weergegeven als u de tinnitusvolumeregeling activeert in het scherm “Toetsen en indicatoren”. Dit gebeurt als naar het verlichtingsgeluid kan worden geluisterd op niveaus die gehoorschade kunnen veroorzaken. De tabel “Maximale draagtijd” in de aanpassoftware geeft het aantal uren aan dat de cliënt veilig gebruik kan maken van Tinnitus SoundSupport.

- Bekijk de maximale draagtijd voor elk programma waarvoor Tinnitus SoundSupport is geactiveerd.
- Schrijf die waarden in de tabel: "Tinnitus SoundSupport: Gebruiksbeperkingen" achterin deze gebruiksaanwijzing.
- Geef uw cliënt instructies dienovereenkomstig.

Waarschuwingen met betrekking tot Tinnitus SoundSupport

Als uw hoorzorgprofessional de Tinnitus SoundSupport geluidsgenerator heeft geactiveerd, let dan op de volgende waarschuwingen.

Er is een aantal mogelijke problemen verbonden aan het gebruik van geluid dat door een tinnitus management apparaat wordt gegenereerd. Het gaat hier onder meer over het mogelijk verslechteren van tinnitus en/of een mogelijke verandering in gehoordrempels.

Als u een verandering in uw gehoor of tinnitus opmerkt of vaststelt, of duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, hartkloppingen of eventuele huidirritatie bij het contactpunt met het apparaat, staak dan onmiddellijk het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts, audioloog of hoorzorgprofessional.

Zoals bij alle apparaten, kan het misbruik van de geluidsgenerator mogelijk schadelijke effecten veroorzaken. U moet ervoor zorgen dat onbevoegd gebruik voorkomen wordt en dat het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren wordt gehouden.

Maximale draagtijd

Volg altijd de maximale draagtijd per dag van de Tinnitus SoundSupport zoals geadviseerd door uw hoorzorgprofessional. Langdurig gebruik kan leiden tot het verslechteren van uw tinnitus of uw gehoorverlies.

Algemene Waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw hoortoestel gaat gebruiken.

Raadpleeg uw hoorzorgprofessional als er sprake is van onverwachte reacties of ernstige incidenten met uw hoortoestel tijdens het gebruik of door het gebruik ervan. Uw hoorzorgprofessional zal u ondersteunen bij het oplossen van het probleem en, indien nodig, melding doen bij de fabrikant en/of de nationale autoriteiten.

Merk op dat uw hoortoestellen het normale gehoor niet herstellen. Ze voorkomen of verbeteren gehoorverlies door een fysiologische aandoening ook niet. Uw hoortoestel is slechts een onderdeel van uw gehoorondersteuning en moet mogelijk worden aangevuld met auditieve training en lessen in liplezen. Merk tevens op dat in de meeste gevallen onregelmatig gebruik van een hoortoestel niet het volledige profijt zal opleveren.

Gebruik van hoortoestellen

Een hoortoestel mag alleen gebruikt worden zoals is voorgeschreven en geadviseerd door de hoorzorgprofessional. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Laat anderen nooit uw hoortoestel dragen, omdat verkeerd gebruik kan leiden tot permanente gehoorschade.

Gevaar van stikken en het inslikken van batterijen en andere kleine onderdelen

Hoortoestellen, de onderdelen en de batterijen moeten uit de buurt worden bewaard van kinderen en personen die ze kunnen inslikken of zich er op een andere manier mee kunnen verwonden.

Batterijen kunnen gemakkelijk voor pillen worden aangezien. Controleer uw medicijnen daarom zorgvuldig voordat u ze inneemt.

Veel hoortoestellen kunnen op verzoek worden voorzien van een kindveilige batterijlade. Dit wordt sterk aanbevolen voor baby's, kleine kinderen en mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornissen.

Waarschuw onmiddellijk een arts als een hoortoestel of klein onderdeel is ingeslikt.

Algemene Waarschuwingen

Batterijgebruik

Gebruik altijd batterijen die worden aanbevolen door uw hoorzorgprofessional. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen gaan lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.

Probeer uw batterijen nooit opnieuw op te laden en verbrand de batterijen nooit. De batterijen zouden kunnen exploderen.

Storingen

Houd er rekening mee dat uw hoortoestel zonder waarschuwing kan uitvallen. Houd dit in gedachten als u afhankelijk bent van waarschuwingssignalen (bv. bij deelname aan het verkeer). Het hoortoestel kan uitvallen, bijvoorbeeld als de levensduur van de batterijen is verstreken of als het slangetje is verstopt door vocht of oorsmeer.

Actieve implantaten

Het hoortoestel is grondig getest en gekenmerkt voor menselijke gezondheid overeenkomstig internationale standaarden voor menselijke blootstelling (Specific Absorption Ratio – SAR), inductieve elektromagnetische kracht en voltages in het menselijk lichaam.

De blootstellingswaarden liggen ruim onder de internationaal geaccepteerde veiligheidsgrenzen voor SAR, inductieve elektromagnetische kracht en voltages in het menselijk lichaam zoals gedefinieerd in de standaarden voor menselijke gezondheid en het samengaan met actieve medische implantaten zoals pacemakers en defibrillators.

De Autophone of MultiTool (die een ingebouwde magneet heeft), dient minstens 30 centimeter van het implantaat verwijderd te blijven; draag het bijvoorbeeld niet in uw borstzak.

Volg in het algemeen de richtlijnen over gebruik met magneten van de fabrikanten van implanteerbare defibrillatoren en pacemakers.

Neem indien u een hersenimplantaat heeft contact op met de fabrikant van uw implantaat voor informatie over het storingsrisico.

Röntgenfoto's, CT-, MRI- en PET-scans, elektrotherapie en operaties

Verwijder uw hoortoestel vóór het maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PETscans, elektrotherapie of een operatie. Het hoortoestel kan beschadigen bij blootstelling aan elektromagnetische velden.

Algemene Waarschuwingen

Hitte en chemicaliën

Stel uw hoortoestel nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto.

Het hoortoestel mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.

Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave, zonnebrandcrème en insectenspray, kunnen uw toestel beschadigen. Verwijder uw hoortoestel altijd voordat u deze producten aanbrengt en laat ze drogen voordat u uw hoortoestel weer plaatst.

Power-toestel

Bij het kiezen, passen en gebruiken van een hoortoestel met een maximale geluidsdruk van meer dan 132 dB SPL (IEC 60138-4/IEC 711) is bijzondere aandacht vereist, omdat er een risico bestaat van aantasting van het resterende gehoor van de gebruiker van het hoortoestel.

Raadpleeg het modellenoverzicht om te zien of uw hoortoestel een power-toestel is.

Mogelijke bijwerkingen

Hoortoestellen en oorstukjes kunnen een versnelde ophoping van oorsmeer veroorzaken.

De anti-allergene materialen in uw hoortoestellen kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg een arts als één van deze bijwerkingen optreedt.

Gebruik in vliegtuigen

Uw hoortoestel is voorzien van draadloze Bluetooth-technologie. Aan boord van een vliegtuig moet het hoortoestel in de vliegtuigmodus gezet worden om Bluetooth te deactiveren, tenzij Bluetooth door het cabinepersoneel wordt toegestaan.

Aansluiting op externe apparatuur

Wanneer uw hoortoestel via een invoerkabel en/of direct verbonden is aan externe apparatuur, wordt de veiligheid van het gebruik van het hoortoestel bepaald door de externe signaalbron. Als de hoortoestellen worden aan-gesloten op externe apparatuur die op een stopcontact is aangesloten, moet deze apparatuur voldoen aan IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.

Oorstukje los in gehoorgang

Als het oorstukje niet op het slangetje zit als het uit het oor wordt gehaald, kan het oorstukje zich nog in de gehoorgang bevinden. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor verdere instructies.

Het aanpassen van de hoortoestellen is niet toegestaan

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen het recht van de gebruiker op het gebruiken van dit apparaat doen vervallen.

Gebruik van accessoires van derden

Gebruik alleen accessoires, transducers en kabels die door de fabrikant zijn geleverd. Niet-originele accessoires kunnen de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van uw apparaat verminderen.

Storing

Het hoortoestel is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. 

Elektromagnetische storing kan optreden in de nabijheid van apparatuur met het symbool aan de rechterkant. Draagbare en mobiele RF (radiofrequentie) communicatie-apparatuur kunnen de prestatie van uw hoortoestel beïnvloeden. Als uw hoortoestel wordt beïnvloed door elektromagnetische interferentie, dient u ervoor te zorgen uit de buurt van de bron te blijven om de interferentie te verminderen.

Troubleshooting guide

| Klacht | Mogelijke oorzaak |
|--|--|
| | Lege batterij |
| Geen geluid | Verstopte oorstukjes (dome, Grip Tip, Micro Mold) |
| Onderbroken of verminderd geluid | Verstopte geluidsopening Vocht Lege batterij |
| Snerpend geluid | Het oorstukje van het hoortoestel is niet goed in het oor geplaatst Ophoping van oorsmeer in de gehoorgang |
| Piepen | Als uw hoortoestel 8 piepjes afspeelt, 4 keer achter- eenvolgend, heeft uw hoortoestel een microfoon controle nodig |
| Koppelings- problemen met Apple apparaat | Bluetooth® verbinding mislukt Alleen één hoortoestel is gekoppeld |

Oplossing

Vervang de batterij

Reinig het oorstukje

Overweeg de oorsmeerfilter, dome of Grip Tip te vervangen

Reinig mould of vervang oorsmeerfilter, dome of Grip Tip

Veeg de batterij met een droge doek af

Vervang de batterij

Plaats het oorstukje opnieuw

Laat de gehoorgang onderzoeken door uw (KNO-)arts

Neem contact op met uw hoorzorgprofessional

1. Ontkoppel uw hoortoestellen (Instellingen → Toegankelijkheid → MFi-hoortoestellen → Apparaten → Vergeet dit apparaat).
 2. Zet Bluetooth® uit en weer aan.
 3. Open en sluit de batterijlade van de hoortoestellen.
 4. Koppel de hoortoestellen opnieuw (zie paragraaf “Hoortoestel koppelen met iPhone”).
-

Als bovenstaande oplossingen niet werken, raadpleeg dan uw hoorzorgprofessional voor hulp.

Water- en stofbestendig (IP68)

Uw hoortoestel is water- en stofbestendig, wat betekent dat het ontworpen is om in alle dagelijkse situaties gedragen te worden. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over transpiratie of regen. Volg de onderstaande richtlijnen wanneer uw hoortoestel in contact komt met water en niet langer werkt:

1. Veeg het water er voorzichtig af.
2. Open de batterijlade en haal de batterij eruit. Veeg eventueel aanwezig water voorzichtig uit de batterijlade.
3. Laat het hoortoestel met geopende batterijlade gedurende ongeveer 30 minuten drogen.
4. Plaats een nieuwe batterij.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik uw hoortoestel niet tijdens het douchen of bij activiteiten in het water. Dompel uw hoortoestel niet onder in water of andere vloeistoffen.

Gebruiksomstandigheden

Gebruiksom-
standigheden

Temperatuur: +1°C tot +40°C

Vochtigheid: 5% tot 93% relatieve
vochtigheid, niet-condenserend

Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Opslag- en
transportom-
standigheden

Temperature and humidity should not
exceed the following limits for extended
periods during transportation and storage:

Transport

Temperatuur: -25°C tot +60°C

Vochtigheid: 5% tot 93% relatieve
vochtigheid, niet-condenserend

Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Opslag

Temperatuur: -25°C tot +60°C

Vochtigheid: 5% tot 93% relatieve
vochtigheid, niet-condenserend

Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Garantie

Certificaat

Naam van eigenaar: _____

Hoorzorgprofessional: _____

Adres hoorzorgprofessional: _____

Telefoon hoorzorgprofessional: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____

Maand: _____

Model rechts: _____

Serienr.: _____

Model links: _____

Serienr.: _____

Internationale garantie

Uw hoortoestel valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste twaalf maanden na levering aan u. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het hoortoestel zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals batterijen, slangetjes, luidsprekers, oorstukjes, oorsmeerfilters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen in het oor, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het toestel of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. Onder deze garantie kiest de fabrikant naar eigen goeddunken of het hoortoestel moet worden gerepareerd of vervangen door een gelijkwaardig model. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorgprofessional heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft

Bij problemen met uw hoortoestel kunt u het beste naar uw hoorzorgprofessional gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden verricht. Uw hoorzorgprofessional kan u helpen bij het verkrijgen van garantieservice van de fabrikant. Hoorzorgprofessionals kunnen kosten in rekening brengen voor hun diensten.

Technische informatie

Het hoortoestel bevat de volgende twee radiotechnologieën:

Het hoortoestel bevat een radiozendontvanger die gebruikmaakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3,84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is zeer zwak en altijd lager dan 15 nW (gewoonlijk lager dan -40 dB μ A/m op een afstand van 10 meter).

Het hoortoestel bevat tevens een radiozendontvanger die gebruikmaakt van Bluetooth Low Energy (BLE) en een propriëtaire radiotechnologie met kort bereik, beide werkend op de 2,4 GHz ISM-band. De radiozender is zwak en altijd lager dan 3 mW, gelijk aan 4,8 dBm totaal uitgestraald vermogen.

Gebruik uw hoortoestellen alleen in gebieden waar draadloze transmissie is toegestaan.

Het hoortoestel voldoet aan de internationale normen betreffende elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op het hoortoestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit boekje.

Meer informatie vindt u op het Productinformatieblad op www.sbohearing.com/download-center/specsavers.

De fabrikant verklaart hierbij dat dit hoortoestel voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Dit medische hulpmiddel voldoet aan EU-verordening 2017/745 inzake medische hulpmiddelen.

De conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij het hoofdkantoor



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark

[www.sbohearing.com/
declarations-of-conformity](http://www.sbohearing.com/declarations-of-conformity)

CE 0123

 Bluetooth®



Afval van elektronische
apparatuur dient te
worden weggegooid
volgens de lokale
voorschriften.



IP68

Uw individuele hoortoestelinstellingen

In te vullen door uw hoorzorgprofessional

Overzicht hoortoestelinstellingen

| Links | | Rechts |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Volumeregelaar | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Programmaschakelaar | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Dempen | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Tinnitus SoundSupport | <input type="checkbox"/> |
| Indicatoren volumeregelaar | | |
| <input type="checkbox"/> | Signalen bij min/max volume | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 'Klikt' bij verandering volume | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Signalen bij gewenst volume | <input type="checkbox"/> |
| Indicatoren batterij | | |
| <input type="checkbox"/> | Waarschuwing lage batterijspanning | <input type="checkbox"/> |

Tinnitus SoundSupport: Gebruiksbeperkingen

Geen gebruiksbeperkingen

| Programma | Opstartvolume (Tinnitus) | Max volume (Tinnitus) |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Max ____ uren per dag | Max ____ uren per dag |
| <input type="checkbox"/> 2 | Max ____ uren per dag | Max ____ uren per dag |
| <input type="checkbox"/> 3 | Max ____ uren per dag | Max ____ uren per dag |
| <input type="checkbox"/> 4 | Max ____ uren per dag | Max ____ uren per dag |

Description of symbols used in this booklet or on the packaging label

| | |
|---|--|
|  | Waarschuwingen Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het toestel wordt gebruikt. |
|  | Fabrikant Het apparaat wordt geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool staan vermeld. Geeft de fabrikant van het medische hulpmiddel aan, zoals gedefinieerd in EU-verordening 2017/745. |
|  | CE-markering Het apparaat voldoet aan alle vereiste EU-voorschriften en -richtlijnen. Het viercijferige nummer geeft de aangemelde instantie aan. |
|  | Elektronisch afval (AEEA) Recycle hoortoestellen, accessoires en batterij volgens de lokale regelgeving. Hoortoestelgebruikers kunnen elektronisch afval ook inleveren bij hun hoorzorgprofessional. Elektronische apparatuur die valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). |
|  | Regulatory Compliance Mark (RCM) Het apparaat voldoet aan de voorschriften betreffende elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markt. |
|  | IP-code Beschermsklasse tegen schadelijk binnendringen van water en stofdeeltjes volgens EN 60529. IP6X geeft algehele bescherming tegen stof aan. IPX8 geeft de bescherming aan tegen de effecten van continue onderdompeling in water. |

| | |
|---|--|
|  Bluetooth® | Bluetooth® logo Geregistreerd handelsmerk van Bluetooth® SIG, Inc. waar het gebruik ervan een licentie vereist. |
|  | Made for Apple badges Geeft aan dat het apparaat compatibel is met iPhone, iPad en iPod touch. |
|  | Houd droog Geeft aan dat het een medisch toestel betreft dat vrij van vocht moet blijven. |
|  | Catalogusnummer Geeft het catalogusnummer van de producent aan zodat het medisch toestel geïdentificeerd kan worden. |
|  | Serienummer Geeft het serienummer van de producent aan zodat een specifiek medisch toestel geïdentificeerd kan worden. |
|  | Ringleiding Dit logo bevat het universele symbool voor gehoorondersteuning. De 'T' geeft aan dat een ringleiding is geïnstalleerd. |
|  | Medisch hulpmiddel Het apparaat is een medisch hulpmiddel. |
|  | Radiofrequentie (RF) zender Uw hoortoestel bevat een RF-zender. |
| GTIN | Global Trade Item Number Een wereldwijd uniek nummer van 14 cijfers dat wordt gebruikt om medische apparaten te identificeren waaronder software voor medische apparatuur. De GTIN in dit boekje heeft betrekking op de firmware van de medische apparatuur. De GTIN op het reglementaire verpakkingsetiket heeft betrekking op de hardware van de medische apparatuur |

Hoofdkantoor

Specsavers Optical Superstores Limited
Cirrus House
Experian Way
Nottingham
NG2 1EP
United Kingdom
www.specsavers.com



000024927800001

